




## Gehtrainer / Combo Walker

### CW 300

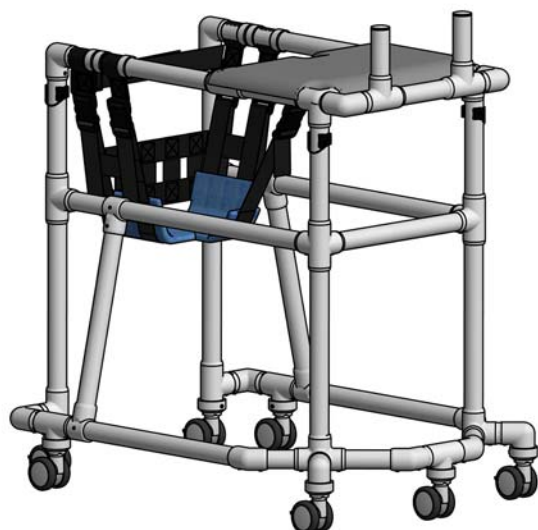

Sitzgurt, der den Benutzer im Falle eines Sturzes auffängt, erhöht dessen Bewegungskompetenz.

Indikation: Einschränkungen der Gehfähigkeit und/oder des Gleichgewichtsinns bei Erwachsenen und Jugendlichen; z.B. Ataxie.

Kontraindikationen: Unzureichende Funktion der oberen Extremitäten oder starke Gleichgewichtsstörungen. Das Benutzergewicht liegt über 150 kg, bzw. die Körpergröße ist kleiner als 160 cm, oder größer als 190 cm. Bei eingeschränkten kognitiven Fähigkeiten darf der Gehtrainer ggf. nur unter Aufsicht verwendet. Das gilt zum Beispiel, wenn

- sich der Benutzer auf den unteren Sicherheitsrahmen des Produkts stellt
- der Benutzer versucht aus dem „Combo Walker“ zu klettern oder sich weit über den oberen Sicherheitsrahmen hinauslehnt
- der Benutzer das Produkt anhebt.

Produktlebensdauer: Die Nutzungsdauer des Modells beträgt bei bestimmungsgemäßer Verwendung 10 Jahre. Voraussetzung dafür ist die Einhaltung aller Vorgaben dieser Gebrauchsanleitung. Je nach Nutzungsintensität kann ein Austausch von Verschleißteilen vor Ablauf dieses Zeitraumes erforderlich sein.

## Inhalt

1 Einleitung .....	1
2 Bestimmungsgemäße Verwendung .....	1
3 Allgemeine Sicherheitsvorschriften .....	1
4 Bedienung und Funktionen.....	1
5 Zubehör .....	2
6 Technische Daten.....	3
7 Kennzeichnung.....	3
8 Reinigung und Desinfektion.....	3
9 Wartung und Inspektion.....	3
10 Lagerung, Wiedereinsatz u. Entsorgung .....	4
11 Garantie / Haftung .....	4

## 1 Einleitung

Diese Gebrauchsanweisung enthält wichtige Informationen zur Anwendung des Produktes. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und befolgen Sie insbesondere die Sicherheitshinweise.

Benutzer mit Sehschwäche finden die Gebrauchsanweisung als PDF auf unserer Webseite ([www.rcn-medizin.de](http://www.rcn-medizin.de)).

## 2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der RCN „Combo-Walker“ ist speziell dafür konzipiert, die Mobilisierung und das Bewegungstraining von Personen mit eingeschränkter Mobilität zu unterstützen und verunsicherte Patienten zu größerer Eigenmobilität anzuregen. Das hohe Rahmengestell vermittelt dem Benutzer ein Sicherheitsgefühl. Auch der

## 3 Allgemeine Sicherheitsvorschriften

Verwenden Sie das Produkt nur auf ebenen Flächen im Innenbereich. Es dürfen keine Treppen oder unebenen Wege befahren werden. Der Gehtrainer hat keine Bremsen und darf daher grundsätzlich nicht im Außenbereich eingesetzt werden. Anfängliche Gehübungen müssen unter ständiger Begleitung durchgeführt werden. Schätzen Sie den Benutzer bezüglich Gehstabilität, Orientierung und Verhalten mit dem Produkt ein.

Die Unterarme des Benutzers sollen auf der Armauflage abgestützt werden. Die Hände sollen jeweils links und rechts die Griffstützen umfassen. Nur beim beidseitigen Einsatz der Arme hat der Benutzer die notwendige Kontrolle und das Lenken gelingt am einfachsten.

Das Modell ist dauerhaft mit einer Temperatur zwischen 0 °C und 60 °C belastbar. Aufgrund der Eigenschaften von Kunststoff können bei Belastung außerhalb dieses Temperaturbereiches Schäden auftreten. Setzen Sie das Produkt auch keinen punktuellen Wärmebelastungen wie z. B. Heizstrahlern aus. Überprüfen Sie das Produkt vor jeder Anwendung auf Schäden. Sollten Schäden vorhanden sein, nutzen Sie das Produkt bis zur Reparatur nicht mehr.

Alle schwerwiegenden Vorfälle im Zusammenhang mit diesem Produkt sind uns (Hersteller) und der zuständigen Behörde zu melden.


## 4 Bedienung und Funktionen

Das Produkt wird fertig montiert geliefert.

- Räder  $\varnothing$  75 mm

Das Modell ist mit 7 freidrehenden  $\varnothing$  75 mm Doppelradrollen ausgerüstet.

Vier Rollen haben eine Feststellbremse. Beim Einführen einer Person in den Gehtrainer sowie während der Höheneinstellung und Fixierung der Person müssen alle Feststellbremsen arretiert sein.

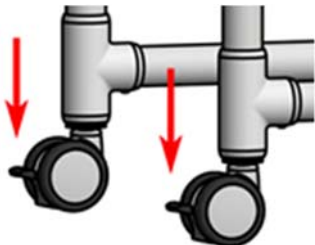

### Erster Einsatz:

Drehen Sie alle vier Rollen mit Feststeller so, dass die Feststeller nach außen zeigen und betätigen Sie diese. Der Gehtrainer kann dann nicht mehr wegrollen.

- Höheneinstellung

Die Höhe des Gehtrainers muss auf die Körpergröße des Benutzers eingestellt werden. Die Armauflage sollte sich ungefähr auf Brusthöhe des Benutzers befinden. Es können 7 verschiedene Höhen in 25-mm-Abständen eingestellt werden. Zum Verstellen der Höhe müssen alle 4 Sicherungsbügel geöffnet werden, um das Oberteil gleichmäßig anheben oder absenken zu können. Bewegen Sie die Armauflage bis auf die gewünschte Höhe und legen Sie dann die Bügel alle wieder um. Die Bügel rasten beim weiteren Verschieben automatisch in der nächsten Rasterstellung ein.

Prüfen Sie dann durch Anheben des Oberteils, ob die Bügel fest in den Bohrungen eingerastet sind. Wurden die Bügel oberhalb der Höhenverstellung geschlossen, dann sitzt das Oberteil lose auf und wird alleine angehoben. Die Einstellung muss dann nach unten korrigiert werden.

**Die höchste zulässige Einstellung ist bei 5 sichtbaren Bohrungen erreicht!**



A: Sicherungsbügel geschlossen

B: Sicherungsbügel offen

**Achtung: Nach der Einstellung müssen alle Hebel wieder nach unten zeigen und eingerastet sein. Es ist wichtig, dass alle Höhenverstellungen in der gleichen Höhe geschlossen werden. Das ist gegeben, wenn jeweils unterhalb die gleiche Anzahl von freien Löchern zu sehen ist. Andernfalls besteht Bruchgefahr an den Höhenverstellungen aufgrund der unterschiedlichen Belastungen.**

- Sitzgurt

Um den Benutzer in den Gehtrainer führen zu können, werden zunächst auf einer Seite die Schnallen des Sitzgurtes geöffnet. Sobald der Benutzer im Gehtrainer steht und sich an den Handstutzen festhalten kann, wird der Sicherheitsgurt zwischen den Beinen des durchgeführten und vor dem Bauch wieder fixiert. Achten Sie darauf, dass der Gurt nicht verdreht ist – das Gurtschloss muss vorne sitzen.

Anschließend werden auch die seitlichen Schnallen des Sitzgurtes wieder verschlossen, damit die der Sitzgurt sicher mit dem Gehtrainer verbunden ist. Zuletzt kann die Höhe des Sitzgurtes durch Ziehen an den Schlaufen auf die passende Höhe des Benutzers eingestellt werden. Diese kann je nach Sicherheitsbedürfnis individuell ausfallen.

Der Benutzer darf den Gehtrainer nur vorübergehend ohne Aufsicht benutzen, wenn verantwortliche Pflegekräfte eine Unfallgefahr durch das Verhalten des Benutzers ausschließen können.

### Warnhinweis: Hohes Verletzungsrisiko

- bei Orientierungslosigkeit, wenn z.B. eine Treppen-Nutzung nicht ausgeschlossen werden kann
- bei Fehlverhalten in Form von Anheben des Produkts. Dabei besteht hohe Kipp- und Sturzgefahr.
- bei dem Versuch über den Rahmen oder zwischen dem Rahmen aus dem Gehtrainer zu klettern.
- bei beengten Platzverhältnissen (schmale Türen, enge Flure, ...) und im Bewegungsbereich stehenden Möbeln (Stuhl- und Tischbeine, Kleiderständer, ...) die zu einem Hängenbleiben des Gehtrainers führen können.




### 5 Zubehör

Kein Zubehör.

## 6 Technische Daten





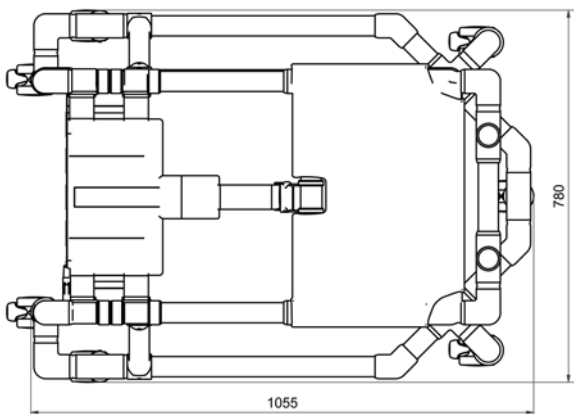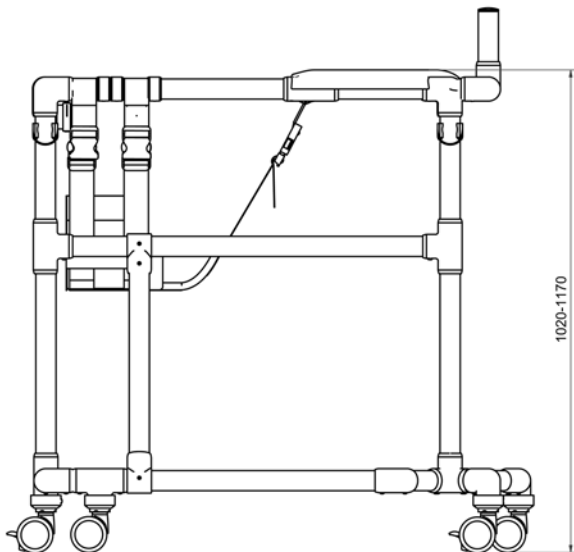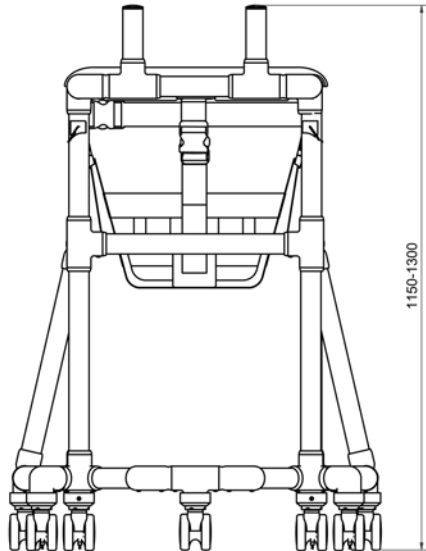


Alle Maße sind in Millimetern angegeben.

CW 300  
 Gewicht: 20,5 kg  
 Maximale Belastbarkeit: 150 kg



## 7 Kennzeichnung

Auf dem Rahmen des Produktes befinden sich Etiketten mit den folgenden Symbolen:

	Medizinprodukt
	CE Kennzeichen
	Bestellnummer
	Seriennummer
	maximales Benutzergewicht kg
	Hersteller
	Herstelldatum JJJJ-MM
ab 01.01.2025	

 UDI



Unique Device Identifier  
Barcode GS1 DataMatrix

(01)  
04260629321092  
(21) 202105673

(01) GTIN (Bsp.)  
(02) Seriennummer (Bsp.)

## 8 Reinigung und Desinfektion

Das Produkt kann einfach mit warmem Wasser, max. 60 °C, und haushaltsüblichen Reinigungsmitteln gereinigt werden. Verwenden Sie dazu einen Schwamm oder ein weiches Tuch. Achtung: Verwenden Sie keine Stahlwolle und keine Scheuermittel! Für die manuelle Aufbereitung wischen Sie alle Komponenten mit einem farblosen Flächen-Desinfektionsmittel ab, das für Kunststoffe geeignet ist. Beachten Sie die Hinweise zu den Einwirkzeiten und zur sicheren Anwendung des Herstellers.

Für Polster aus Polyurethanschaum gilt: Nicht mit scharfen Gegenständen reinigen oder bearbeiten. Nur Reinigungsmittel auf Seifenbasis (basisch) anwenden, Temperatur bis 80 °C. Saure Reinigungsmittel sind nicht geeignet.

Achtung: Beim Einsatz von Schnelldesinfektionsmitteln darf grundsätzlich während der Einwirkzeit und 20 Minuten danach nicht an den Polstern gerieben werden. Die Polster müssen ggf. vorher von Schmutz befreit werden.

## 9 Wartung und Inspektion

Das Produkt ist wartungsfrei, wenn die beschriebenen Reinigungs- und Sicherheitsvorschriften beachtet werden.

Eine komplette Inspektion ist mindestens einmal jährlich durchzuführen. Hierbei muss der korrekte und feste Sitz der Verbindungen geprüft werden. Ebenso müssen alle Verbindungselemente auf Rissbildungen untersucht werden. Gegebenenfalls

muss das Produkt bis nach der Reparatur außer Betrieb genommen werden.

Wöchentlich sind die Lauf- und Dreheigenschaften der Rollen und die Funktion der Feststellbremsen zu prüfen.

### **10 Lagerung, Wiedereinsatz u. Entsorgung**

**Lagerung:** Lagern Sie das Produkt bei Temperaturen von 0 °C bis 40 °C in einer trockenen Umgebung bis max. 75% Luftfeuchtigkeit. Das Modell kann nicht zerlegt oder gefaltet werden.

**Wiedereinsatz:** Das Produkt ist für den wiederholten Einsatz geeignet. Die Häufigkeit ist von der Abnutzung und der Funktionstauglichkeit abhängig. Reinigen und desinfizieren Sie das Produkt entsprechend Kapitel 8. Geben Sie das Produkt nur weiter, wenn alle Komponenten ihre Funktionen erfüllen.

**Entsorgung:** Das Produkt beinhaltet keine gefährlichen Stoffe. Sie können das Produkt der lokalen Entsorgung zuführen.

### **11 Garantie / Haftung**

Für das gelieferte RCN Produkt leisten wir dem Endabnehmer gegenüber Garantie zu den folgenden Bedingungen:

Die Garantiezeit beträgt generell 3 Jahre, für den Kunststoff- oder Metallrahmen beträgt sie 5 Jahre. Sie beginnt mit dem Zeitpunkt der Übergabe des Produkts an den Benutzer. Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg in Verbindung mit der Angabe der auf dem Produkt aufgebrachten Serien-Nummer.

Die Garantie umfasst die Beseitigung der innerhalb der Garantiezeit auftretenden Schäden oder Mängel am Produkt, die nachweislich auf Material- oder Fertigungsfehlern beruhen. Hiervon ausgenommen sind Teile, die einem natürlichen Verschleiß unterliegen. Wir behalten uns vor, die Garantieleistung durch Austausch oder Reparatur der beschädigten Teile zu erbringen. Nicht unter die Garantie fallen Schäden infolge unsachgemäßer Handhabung und Benutzung, durch Nichtbeachtung der hier enthaltenen Hinweise, bei Verwendung nicht geeigneter oder abrasiver Reinigungsmittel bzw. im Falle mutwilliger Beschädigung.

Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler/Handelspartner oder direkt an RCN. Falls das Produkt zum Zweck der Reparatur an uns versandt wird, geschieht dies auf Kosten und Gefahr des Absenders.

Berechtigte Garantieleistungen werden ohne jede Berechnung durchgeführt. Sie bewirken weder eine Verlängerung noch einen Neubeginn der Garantiezeit für das Produkt.

Weitergehende Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz von nicht am Produkt entstandenen Schäden, sind ausgeschlossen. Diese Garantie besteht zusätzlich und beeinträchtigt in keiner Weise gesetzliche oder andere Rechte von Endverbrauchern.

Wir betrachten es als unsere vorrangige Aufgabe, Produkte zu entwickeln und herzustellen, die den Bedürfnissen unserer Kunden bestmöglich entsprechen. Sagen Sie es uns, wenn Sie meinen,

dass wir etwas ändern oder verbessern sollten und wenn Sie zufrieden sind, sagen Sie uns das auch, denn darüber freuen wir uns natürlich am meisten. Unsere Email-Adresse, Telefonnummer und Faxnummer sowie unsere Postanschrift finden Sie auf der ersten Seite.

Ihr RCN Team

Stand: 31.08.2023