



Multifunktions-Dusch- und Toilettenrollstuhl

DR 250 PPG



Inhalt

1 Einleitung	1
2 Bestimmungsgemäße Verwendung	1
3 Allgemeine Sicherheitsvorschriften	1
4 Bedienung und Funktionen.....	1
5 Zubehör	3
6 Technische Daten.....	3
7 Kennzeichnung.....	3
8 Reinigung und Desinfektion.....	3
9 Wartung und Inspektion.....	4
10 Lagerung, Wiedereinsatz u. Entsorgung	4
11 Garantie / Haftung	4

1 Einleitung

Diese Gebrauchsanweisung enthält wichtige Informationen zur Anwendung des Produktes. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und befolgen Sie insbesondere die Sicherheitshinweise.

2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Modell ist als Hilfsmittel zum Duschen, für den Toilettengang sowie für die persönliche Hygiene vorgesehen. Zudem dient der mobile Stuhl mit Fußstütze als Transportstuhl innerhalb der Nasszelle. Die Fortbewegung kann als Schieberollstuhl mit einer Hilfsperson oder als Selbstfahrer erfolgen. Bei der selbständigen Benutzung muss die Person körperlich und geistig in der Lage sein, den Rollstuhl sicher zu bedienen.

Die Rückenlehne und die Armlehnen sorgen für eine stabile Sitzposition.

Indikation: Das Produkt unterstützt bei Einschränkungen der Mobilität oder des Gleichgewichtssinnes. Vorgesehene Benutzer sind Erwachsene und Jugendliche. Kontraindikation: Unfähigkeit zum Sitzen.

Produktlebensdauer: Die voraussichtliche Lebensdauer beträgt 10 Jahre. Bei einzelnen Komponenten (z. B. Rädern und Polstern) kann je nach Verschleiß, ein früherer Austausch erforderlich sein. Durch den Einsatz von Ersatzteilen kann die Lebensdauer erhöht werden.

3 Allgemeine Sicherheitsvorschriften

Der Transportstuhl ist nur für die Nutzung innerhalb von Gebäuden zugelassen. Er ist nur für ebene Flächen geeignet. Nutzen Sie das Produkt nicht ganztägig, da es aufgrund fehlender Federung und Einstellmöglichkeiten bei einer Langzeitnutzung zu Gesundheitsschäden führen kann. Während das Produkt in Bewegung ist, darf nicht zwischen Bremse und Rad oder in die rotierenden Speichen der Antriebsräder gefasst werden. Es dürfen keine Gegenstände, wie z. B. Kleidungsstücke, in die Speichen geraten.

Kleinere Bodenunebenheiten und Hindernisse dürfen nur mithilfe einer Begleitperson überfahren werden. Dabei muss das Hindernis mit beiden Lenkrollen gleichzeitig überfahren werden, um seitliches Kippen zu verhindern. Verlagern Sie Ihr Gewicht nicht durch seitliches, frontales oder rückseitiges Neigen des Oberkörpers, wie z.B. beim Greifen nach Gegenständen. Dies kann zum Kippen des Stuhls führen. Überschreiten Sie bei der Benutzung des Rollstuhls nicht das Schrittempo. Entfernen Sie nach jedem Gebrauch Seifenspuren vom Stuhl, um Unfällen aufgrund von Rutschgefahr vorzubeugen.

Das Modell ist dauerhaft mit einer Temperatur zwischen 0 °C und 60 °C belastbar. Aufgrund der Eigenschaften von Kunststoff können bei Belastung außerhalb dieses Temperaturbereiches Schäden auftreten. Setzen Sie das Produkt auch keinen punktuellen Wärmebelastungen wie z. B. Heizstrahlern aus. Überprüfen Sie das Produkt vor jeder Anwendung auf Schäden. Sollten Schäden vorhanden sein, nutzen Sie das Produkt bis zur Reparatur nicht mehr.

Alle schwerwiegenden Vorfälle im Zusammenhang mit diesem Produkt sind uns (Hersteller) und der zuständigen Behörde zu melden.

4 Bedienung und Funktionen

- 24“ Räder mit Greifring


Die 24“ Antriebsräder aus Polyurethan sind pannen-sicher. Als Selbstfahrer sind ausschließlich die Greifringe zum Antreiben zu nutzen. Kollisionen

oder Wandkontakt sind dann besonders zu vermeiden, da die Hände dann über den Rollstuhl hinausreichen und besonders gefährdet sind.

- Feststellbremsen


Zum Feststellen der Kniehebelbremsen müssen die Hebel nach vorne/unten gedrückt werden. Im festgestellten Zustand darf der Rollstuhl mit Belastung nicht bewegt werden können.

Feststellbremsen dürfen nicht während der Fahrt zum Reduzieren der Geschwindigkeit genutzt werden. Bei ungleichmäßiger Betätigung kann es zum Richtungsverlust kommen. Beim plötzlichen Schließen bremsst der Rollstuhl stark ab und der Benutzer kann herausfallen.

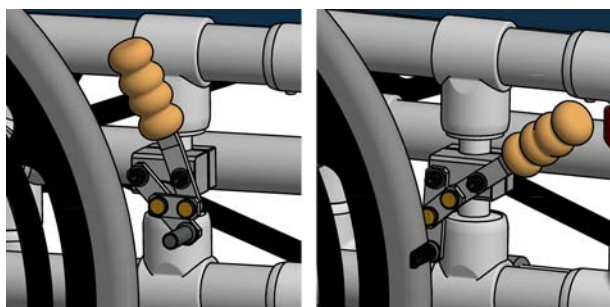

- Ausziehbare Fußstütze FT

Die Fußstütze dient zum Aufstellen der Füße. Die Fußstütze ist an den unteren Rahmenholmen gleitend befestigt; so lässt sie sich einfach durch Vorziehen bzw. Zurückschieben in Position bringen. Die Fußstütze darf nicht mit dem vollen Körpergewicht belastet werden, da ansonsten der Rollstuhl kippen kann.

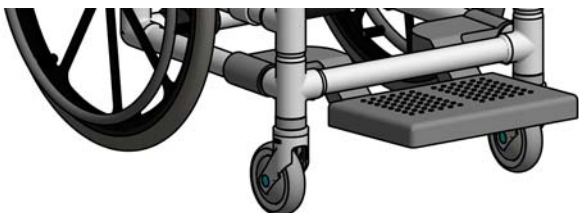


- ausschwenkbare Armlehne ASA

Sie erleichtert das Übersetzen des Benutzers in bzw. aus dem Stuhl. Lösen Sie dazu zuerst die Arretierung (1), indem Sie den roten Kunststoffbügel um 90° nach oben drehen. Heben Sie dann die Armlehne hinten am Drehgelenk an (2) und schwenken Sie sie nach außen (3). Das Arretieren erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Nach erfolgtem Transfer die Armlehne unbedingt immer arretieren! Achtung: Belasten Sie die Armlehne nicht im ausgeschwenkten Zustand!

A: Sicherungsbügel geschlossen

B: Sicherungsbügel offen

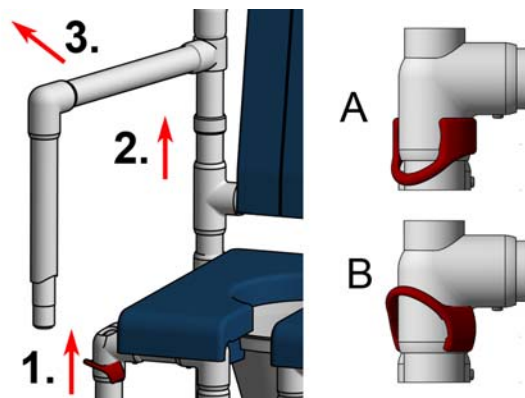

- Polstersitz PP

Der Sitz aus Polyurethanschaum erhöht den Sitzkomfort und erleichtert zusätzlich den Zugang zu den Intimzonen.

Die Sitze werden einfach auf den Sitzrahmen des Stuhls aufgelegt und können zur Reinigung abgenommen werden. Der Topf wird bei Standard-sitzen von der linken Seite eingeschoben. Dabei muss ggf. der Henkel parallel zur Einschubrichtung liegen!


- Toilettentopf TK

Der Toilettentopf aus Kunststoff (Polypropylen) ist temperaturbeständig bis 105 °C. Der Topf passt in alle Topfspüler und ist beständig gegen Desinfektionsmittel. Durch das Andrücken des Deckels wird ein Vakuum erzeugt, welches austretende Gerüche reduziert. Der Topf wird festgehalten, indem man mit den Fingern einer Hand unter den Rand greift. Er hat auf der Innenseite eine Skala, um den Füllstand abzulesen. Das Einführen des Eimers erfolgt entsprechend der Abbildung.



- Polsterrücken PR



Der Polsterrücken erhöht den Sitzkomfort. Er wird einfach auf den unteren Holm gedrückt und dann über den oberen Holm mit leicht nach oben gezogener Lippe gedrückt. Ebenso leicht kann der Polsterrücken zur Reinigung abgenommen werden. Auf der Rückseite kann der Deckel des Toilettentopfes durch Aufdrücken schnell befestigt werden.

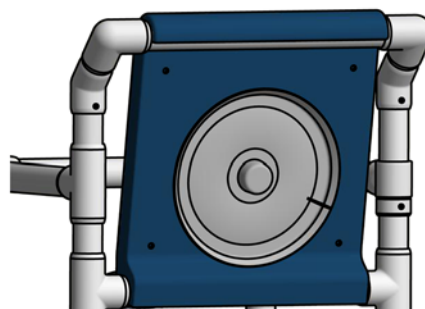

5 Zubehör

• Einleger PPE

Der Einleger dient zum Verschließen des Sitzausschnittes, um ggf. die Geruchsausbreitung bei Nutzung des Stuhles als Nachtstuhl zu reduzieren und um die Sitzfläche optisch zu verschließen. Mit dem Einleger wird keine voll belastbare geschlossene Sitzfläche hergestellt. Beim Duschvorgang oder Toilettengang ist die Entnahme des Einlegers nötig.

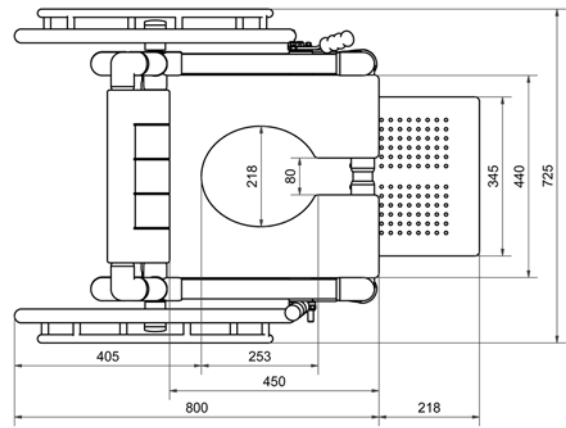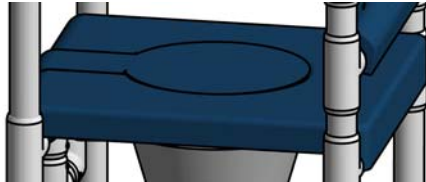

DR 250 PPG

Gewicht:



29,0 kg

Maximale Belastbarkeit:

150 kg





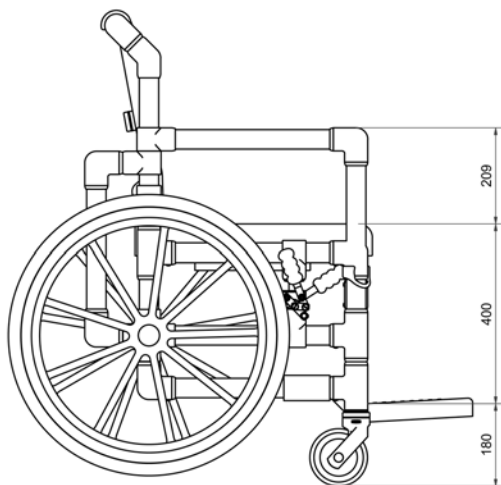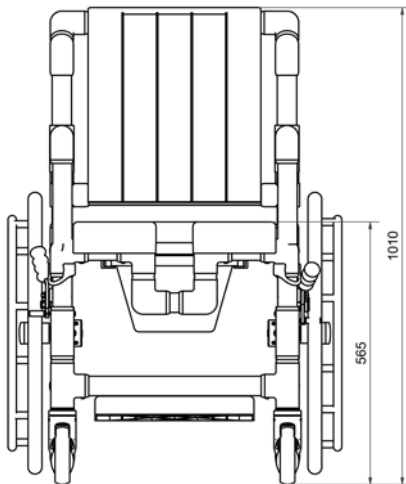


6 Technische Daten

Alle Maße sind in Millimetern angegeben.





7 Kennzeichnung

Auf dem Rahmen des Produktes befinden sich Etiketten mit den folgenden Symbolen:

	Medizinprodukt
	CE Kennzeichen
	Bestellnummer
	Seriennummer
	maximales Benutzergewicht kg
	Hersteller
	Herstelldatum JJJJ-MM

ab 01.01.2025

		Unique Device Identifier Barcode GS1 DataMatrix
(01)	(01) GTIN (Bsp.)	
04260629321092	(02) Seriennummer (Bsp.)	
(21) 202105673		

8 Reinigung und Desinfektion

Das Produkt kann einfach mit warmem Wasser, max. 60 °C, und haushaltsüblichen Reinigungsmitteln gereinigt werden. Verwenden Sie dazu einen Schwamm oder ein weiches Tuch. Achtung: Verwenden Sie keine Stahlwolle und keine Scheuermittel! Für die manuelle Aufbereitung wischen Sie alle Komponenten mit einem farblosen Flächen-Desinfektionsmittel ab, das für Kunststoffe geeignet ist. Beachten Sie die Hinweise zu den Einwirkzeiten und zur sicheren Anwendung des Herstellers.

Für die Polster aus Polyurethanschaum gilt: Nicht mit scharfen Gegenständen reinigen oder bearbeiten. Nur Reinigungsmittel auf Seifenbasis (basisch) anwenden, Temperatur bis 80 °C. Saure Reinigungsmittel sind nicht geeignet.

Achtung: Beim Einsatz von Schnelldesinfektionsmitteln darf grundsätzlich während der Einwirkzeit und 20 Minuten danach nicht an den Polstern gerieben werden. Die Polster müssen ggf. vorher von Schmutz befreit werden.

Damit die Leichtgängigkeit der ausziehbaren Fußstütze erhalten bleibt, reinigen Sie bitte die Zwischenräume nach Bedarf durch Hin- und Herschieben der gleitenden Teile unter einem starken Wasserstrahl. Das Einsprühen der Gleitflächen mit Silikonspray fördert die Leichtgängigkeit.

9 Wartung und Inspektion

Das Produkt ist wartungsfrei, wenn die beschriebenen Reinigungs- und Sicherheitsvorschriften beachtet werden.

Eine komplette Inspektion ist mindestens einmal jährlich durchzuführen. Hierbei muss der korrekte und feste Sitz der Verbindungen geprüft werden. Ebenso müssen alle Verbindungselemente auf Rissbildungen untersucht werden. Gegebenenfalls muss das Produkt bis nach der Reparatur außer Betrieb genommen werden.

Wöchentlich sind die Lauf- und Dreheigenschaften der Rollen und die Funktion der Feststellbremsen zu prüfen.

10 Lagerung, Wiedereinsatz u. Entsorgung

Lagerung: Lagern Sie das Produkt bei Temperaturen von 0 °C bis 40 °C in einer trockenen Umgebung bis max. 75% Luftfeuchtigkeit. Das Modell kann nicht zerlegt oder gefaltet werden.

Wiedereinsatz: Das Produkt ist für den wiederholten Einsatz geeignet. Die Häufigkeit ist von der Abnutzung und der Funktionstauglichkeit abhängig. Reinigen und desinfizieren Sie das Produkt entsprechend Kapitel 8. Geben Sie das Produkt nur weiter, wenn alle Komponenten ihre Funktionen erfüllen.

Entsorgung: Das Produkt beinhaltet keine gefährlichen Stoffe. Sie können das Produkt der lokalen Entsorgung zuführen.

11 Garantie / Haftung

Für das gelieferte RCN Produkt leisten wir dem Endabnehmer gegenüber Garantie zu den folgenden Bedingungen:

Die Garantiezeit beträgt generell 3 Jahre, für den Kunststoff- oder Metallrahmen beträgt sie 5 Jahre. Sie beginnt mit dem Zeitpunkt der Übergabe des Produkts an den Benutzer. Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg in Verbindung mit der Angabe der auf dem Produkt aufgebrachten Serien-Nummer.

Die Garantie umfasst die Beseitigung der innerhalb der Garantiezeit auftretenden Schäden oder Mängel am Produkt, die nachweislich auf Material- oder Fertigungsfehlern beruhen. Hiervon ausgenommen sind Teile, die einem natürlichen

Verschleiß unterliegen. Wir behalten uns vor, die Garantieleistung durch Austausch oder Reparatur der beschädigten Teile zu erbringen. Nicht unter die Garantie fallen Schäden infolge unsachgemäßer Handhabung und Benutzung, durch Nichtbeachtung der hier enthaltenen Hinweise, bei Verwendung nicht geeigneter oder abrasiver Reinigungsmittel bzw. im Falle mutwilliger Beschädigung.

Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler/Handelspartner oder direkt an RCN. Falls das Produkt zum Zweck der Reparatur an uns versandt wird, geschieht dies auf Kosten und Gefahr des Absenders.

Berechtigte Garantieleistungen werden ohne jede Berechnung durchgeführt. Sie bewirken weder eine Verlängerung noch einen Neubeginn der Garantiezeit für das Produkt.

Weitergehende Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz von nicht am Produkt entstandenen Schäden, sind ausgeschlossen. Diese Garantie besteht zusätzlich und beeinträchtigt in keiner Weise gesetzliche oder andere Rechte von Endverbrauchern.

Wir betrachten es als unsere vorrangige Aufgabe, Produkte zu entwickeln und herzustellen, die den Bedürfnissen unserer Kunden bestmöglich entsprechen. Sagen Sie es uns, wenn Sie meinen, dass wir etwas ändern oder verbessern sollten und wenn Sie zufrieden sind, sagen Sie uns das auch, denn darüber freuen wir uns natürlich am meisten. Unsere Email-Adresse, Telefonnummer und Faxnummer sowie unsere Postanschrift finden Sie auf der ersten Seite.

Ihr RCN Team

Stand: 12.04.2023