





Infusionsständer für den MRT-Bereich

IH PH MRT und IH PH HV MRT

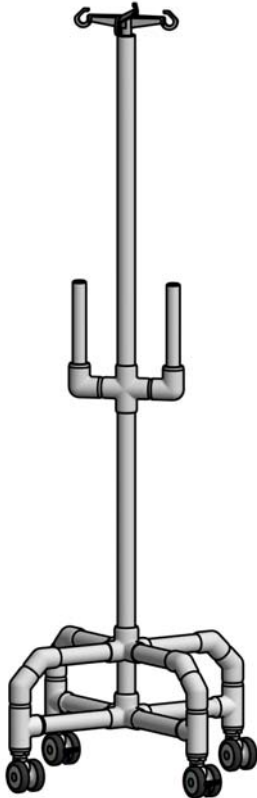

IH PH MRT

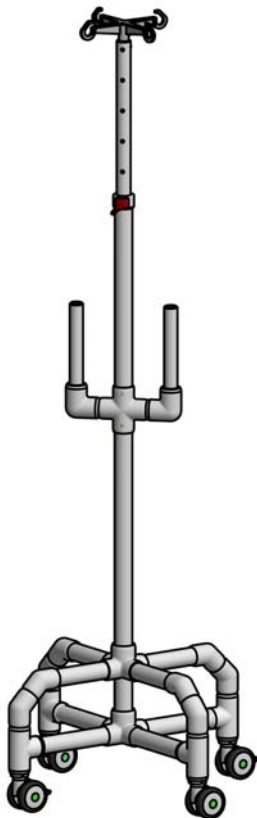

IH PH HV MRT

Inhalt

1 Allgemeines und Eingangskontrolle.....	1
2 Allgemeine Produkthinweise.....	1
3 Besondere Hinweise.....	2
4 Bedienung und Funktionen.....	2
5 Technische Daten.....	2
6 Reinigung und Desinfektion.....	3
7 Wartung und Inspektion.....	3
8 Fehler! Textmarke nicht definiert.....	3
9 Garantie / Haftung.....	3

1 Allgemeines und Eingangskontrolle

Herzlichen Glückwunsch! Sie erhalten heute ein Qualitätsprodukt aus dem Hause RCN. Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme. Sie enthält wichtige Informationen und Sicherheitshinweise.

Eingangskontrolle: Jedes RCN Produkt wird im Werk vor Auslieferung auf Mängelfreiheit geprüft. Sie sollten aber dennoch das Produkt sofort nach Empfang – am besten noch in Anwesenheit des Überbringers – auf evtl. beim Transport entstandene Beschädigungen überprüfen. Sollten Sie solche feststellen, verlangen Sie vom Überbringer eine TATBESTANDSAUFNAHME (er ist dazu verpflichtet) und senden Sie diese zusammen mit einer ABTRETUNGSERKLÄRUNG, (mit der Sie Ansprüche an uns abtreten) und den Transportunterlagen, an uns.

Wir werden dann alles Weitere veranlassen. Schäden, die Sie erst nach erfolgter Annahme feststellen, lassen sich gegenüber den Transporteuren nur schwer oder gar nicht durchsetzen. Nehmen Sie sich also bitte die zur Eingangskontrolle erforderliche Zeit. Sie erhalten RCN Produkte in der Regel komplett montiert und einsatzbereit. Sollte bei dem Produkt, z. B. zur Vermeidung eines unnötig hohen Transportvolumens oder zur Anpassung vor Ort, ein oder mehrere Teile lose beigefügt sein, beachten Sie bitte unbedingt die für eine korrekte Montage angebrachten Markierungen und sorgen Sie für die ordnungsgemäße Montage.

Wichtig: Sollten Sie das Produkt im Winter erhalten und es somit auf dem Transport ggf. Minustemperaturen ausgesetzt gewesen sein, so belasten Sie es solange nicht, bis es Raumtemperatur angenommen hat.

2 Allgemeine Produkthinweise

Verwenden Sie das Produkt nur auf ebenen Flächen im Innenbereich. Das Modell ist dauerhaft temperaturbelastbar zwischen 0 °C und 60 °C. Aufgrund der Eigenschaften von Kunststoff können bei Belastung außerhalb dieses Temperaturbereiches Schäden auftreten. Setzen Sie das Produkt auch keinen punktuellen Wärmebelastungen wie z. B. Heizstrahlern aus. Überprüfen Sie das Produkt vor jeder Anwendung auf Schäden. Sollten Schäden vorhanden sein,

nutzen Sie das Produkt bis zur Reparatur nicht mehr.

3 Besondere Hinweise

Das Produkt ist für MRT-Bereiche mit Geräten bis 3 Tesla geeignet.



4 Bedienung und Funktionen


Das Produkt ist mit einem Fußkreuz mit insgesamt vier freidrehenden 75-mm-Kunststoff-Messing-Doppelradrollen ausgestattet. Zwei Rollen haben eine Feststellbremse, um das Wegrollen des Produkts zu verhindern. Das Flaschenkreuz mit vier Haken kann insgesamt mit 4 kg belastet werden. Je Haken ist eine Belastung bis 2 kg möglich.

Das Modell mit zusätzlicher Höhenverstellung kann auf die individuelle Größe des Nutzers angepasst werden. Während der Höheneinstellung darf das Flaschenkreuz nicht belastet werden.

Zuerst muss der rote Sicherheitsbügel geöffnet werden (1), um das innenliegende Rohr nach oben und unten zu bewegen (2). Bei der gewünschten Höhe kann der Sicherungsbügel wieder geschlossen werden, damit das Rohr in der nächsten Bohrung einrastet.


A: Sicherungsbügel geschlossen

B: Sicherungsbügel offen

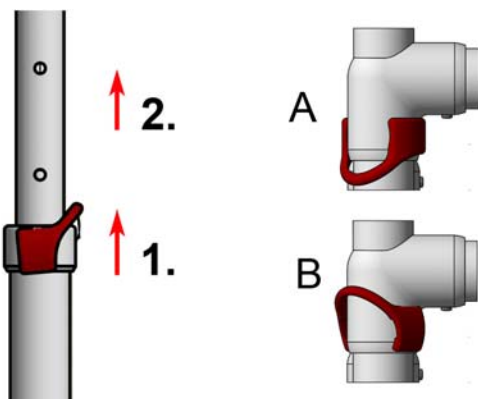

5 Technische Daten

Alle Maße sind in Millimetern angegeben.

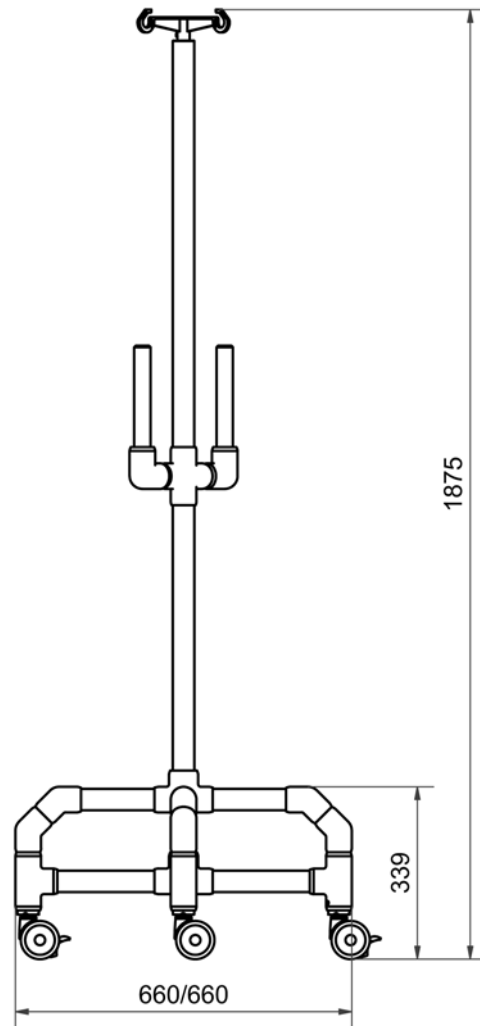

IH PH MRT

Gewicht:


6,5 kg

Max Belastbarkeit je Haken

2 kg

Max Belastbarkeit je Pumpenhalter

9 kg

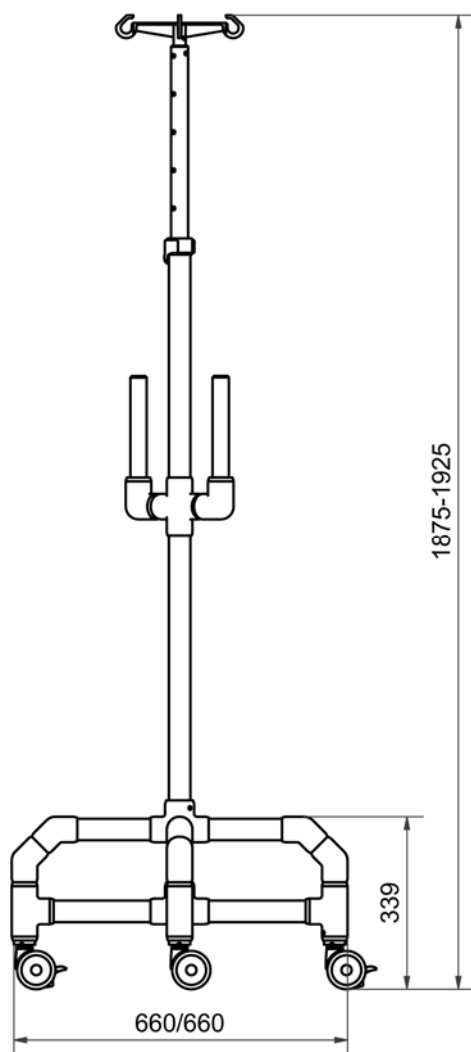

IH PH HV MRT

Gewicht:	7,0 kg
Max Belastbarkeit je Haken	2 kg
Max Belastbarkeit je Pumpenhalter	9 kg

6 Reinigung und Desinfektion

Das Produkt kann einfach mit warmem Wasser und haushaltsüblichen Reinigungsmitteln gereinigt werden. Verwenden Sie dazu einen Schwamm oder ein weiches Tuch. Achtung: Verwenden Sie keine Stahlwolle und keine Scheuermittel! Zur Desinfektion verwenden Sie farblose, für Kunststoffe geeignete Mittel.

7 Wartung und Inspektion

Das Produkt ist wartungsfrei, wenn die beschriebenen Reinigungs- und Sicherheitsvorschriften beachtet werden.

Eine komplette Inspektion ist mindestens einmal jährlich durchzuführen. Hierbei muss der korrekte und feste Sitz der Verbindungen geprüft werden. Ebenso müssen alle Verbindungselemente auf Rissbildungen untersucht werden. Gegebenenfalls muss das Produkt bis nach der Reparatur außer Betrieb genommen werden.

Wöchentlich sind die Lauf- und Dreheigenschaften der Rollen und die Funktion der Feststellbremsen zu prüfen.

8 Fehler! Textmarke nicht definiert.

Lagerung: Lagern Sie das Produkt bei Temperaturen von 0 °C bis 40 °C in einer trockenen Umgebung bis max. 75% Luftfeuchtigkeit. Das Modell kann nicht zerlegt oder gefaltet werden.

Wiedereinsatz: Das Produkt ist für den wiederholten Einsatz geeignet. Die Häufigkeit ist von der Abnutzung und der Funktionstauglichkeit abhängig. Reinigen und desinfizieren Sie das Produkt entsprechend dieser Gebrauchsanleitung. Geben Sie das Produkt nur weiter, wenn alle Komponenten ihre Funktionen erfüllen.

9 Garantie / Haftung

Für das gelieferte RCN Produkt leisten wir dem Endabnehmer gegenüber Garantie zu den folgenden Bedingungen:

Die Garantiezeit beträgt generell 3 Jahre, für den Kunststoff- oder Metallrahmen beträgt sie 5 Jahre. Sie beginnt mit dem Zeitpunkt der Übergabe des Produkts an den Benutzer. Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg in Verbindung mit der Angabe der auf dem Produkt aufgetragenen Serien-Nummer.

Die Garantie umfasst die Beseitigung der innerhalb der Garantiezeit auftretenden Schäden oder Mängel am Produkt, die nachweislich auf Material- oder Fertigungsfehlern beruhen. Hiervon ausgenommen sind Teile, die einem natürlichen Verschleiß unterliegen. Wir behalten uns vor, die Garantieleistung durch Austausch oder Reparatur der beschädigten Teile zu erbringen. Nicht unter die Garantie fallen Schäden infolge unsachgemäßer Handhabung und Benutzung, durch Nichtbeachtung der hier enthaltenen Hinweise, bei Verwendung nicht geeigneter oder abrasiver Reinigungsmittel bzw. im Falle mutwilliger Beschädigung.

Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler/Handelspartner oder direkt an RCN. Falls das Produkt zum Zweck der Reparatur an uns versandt wird, geschieht dies auf Kosten und Gefahr des Absenders.

Berechtigte Garantieleistungen werden ohne jede Berechnung durchgeführt. Sie bewirken weder eine Verlängerung noch einen Neubeginn der Garantiezeit für das Produkt.

Weitergehende Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz von nicht am Produkt entstandenen Schäden, sind ausgeschlossen. Diese Garantie besteht zusätzlich und beeinträchtigt in keiner Weise gesetzliche oder andere Rechte von Endverbrauchern.

Wir betrachten es als unsere vorrangige Aufgabe, Produkte zu entwickeln und herzustellen, die den Bedürfnissen unserer Kunden bestmöglich entsprechen. Sagen Sie es uns, wenn Sie meinen, dass wir etwas ändern oder verbessern sollten und wenn Sie zufrieden sind, sagen Sie uns das auch, denn darüber freuen wir uns natürlich am meisten.

Unsere Email-Adresse, Telefonnummer und Faxnummer sowie unsere Postanschrift finden Sie auf der ersten Seite.

Ihr RCN Team

Stand: 12.09.2023