



Ruhe- und Pflegesessel RPS 480



Abbildung mit optionalem Servierbrett

Inhalt

1 Einleitung	1
2 Bestimmungsgemäße Verwendung	1
3 Allgemeine Sicherheitsvorschriften	1
4 Bedienung und Funktionen.....	1
5 Zubehör	3
6 Technische Daten.....	3
7 Kennzeichnung.....	3
8 Reinigung und Desinfektion.....	4
9 Wartung und Inspektion.....	4
10 Lagerung, Wiedereinsatz u. Entsorgung.....	4
11 Garantie / Haftung	4

1 Einleitung

Diese Gebrauchsanweisung enthält wichtige Informationen zur Anwendung des Produktes. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und befolgen Sie insbesondere die Sicherheitshinweise.

Sie finden die aktuelle Version der Gebrauchsanweisung als PDF auf unserer Webseite (www.rcn-medizin.de). Diese kann bei einer Sehschwäche vergrößert dargestellt werden.

2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Ruhe- und Pflegesessel RPS 480 ist mit seinem speziellen Polstersystem ideal um bettlägerige Nutzer zu mobilisieren und am sozialen Leben teilhaben zu lassen. Er unterstützt durch seine vielfältigen Einstellmöglichkeiten die bequeme, sichere und beruhigende Lagerung von Nutzern bei

verschiedenen, insbesondere neurologischen Erkrankungen.

Produktlebensdauer: Die voraussichtliche Lebensdauer beträgt 10 Jahre. Bei einzelnen Komponenten (z. B. Rädern und Polstern) kann je nach Verschleiß, ein früherer Austausch erforderlich sein. Durch den Einsatz von Ersatzteilen kann die Lebensdauer erhöht werden.

3 Allgemeine Sicherheitsvorschriften

Verwenden Sie das Produkt nur auf ebenen Flächen im Innenbereich. Wenn die Beinauflage waagrecht steht, dann darf diese nicht allein belastet werden, es besteht dann Kippgefahr. Beim Umsetzen müssen alle Feststeller geschlossen sein.

Alle schwerwiegenden Vorfälle im Zusammenhang mit diesem Produkt sind uns (Hersteller) und der zuständigen Behörde zu melden.

4 Bedienung und Funktionen

• Kippfunktion

Der ganze Sessel kann über eine Kippfunktion in eine bequeme Ruheposition gestellt werden.



Zum Auslösen der Kippfunktion betätigen Sie den rechten Hebel auf der Rückseite der Rückenlehne. Die Funktion wird durch eine Gasdruckfeder unterstützt.



- Rückenlehne Neigung

Zum Einstellen der Neigung der Rückenlehne betätigen Sie den linken Hebel auf der Rückseite der Rückenlehne. Auch diese Funktion wird durch eine Gasdruckfeder unterstützt.



- Beinauflage Neigung

Zum Einstellen der Neigung der Beinauflage, gasdruckfederunterstützt, betätigen Sie den Hebel auf der rechten Unterseite der Beinauflage.



- Pelotten

Die Pelotten können in einem engen und in einem weiten Abstand zueinander fixiert werden. Zum Lösen wird der Rasterbolzen nach oben gezogen. Nach dem Loslassen rastet er beim Weiterdrehen in der nächsten Stellung ein. Alternativ können die Pelotten auch ganz nach hinten geschwenkt werden.


- Armlehnen


Auch die Armlehnen können in einem engen und in einem weiten Abstand zueinander fixiert werden. Zum Lösen wird der Rasterbolzen nach vorne gezogen. Nach dem Loslassen rastet er beim Weiterdrehen in der nächsten Stellung ein. Alternativ können die Armlehnen zum Umsetzen auch nach unten geklappt werden.



- Rückenpolster, abnehmbar

Das Rückenpolster kann zur Reinigung abgenommen werden. Dazu müssen drei Reißverschlüsse geöffnet werden. Achten Sie beim Befestigen darauf, dass die Bowdenzüge zwischen den zwei oberen Reißverschlüssen liegen. Der Schaumstoff kann durch einen weiteren Reißverschluss entnommen werden. Reinigung siehe Kapitel 8.

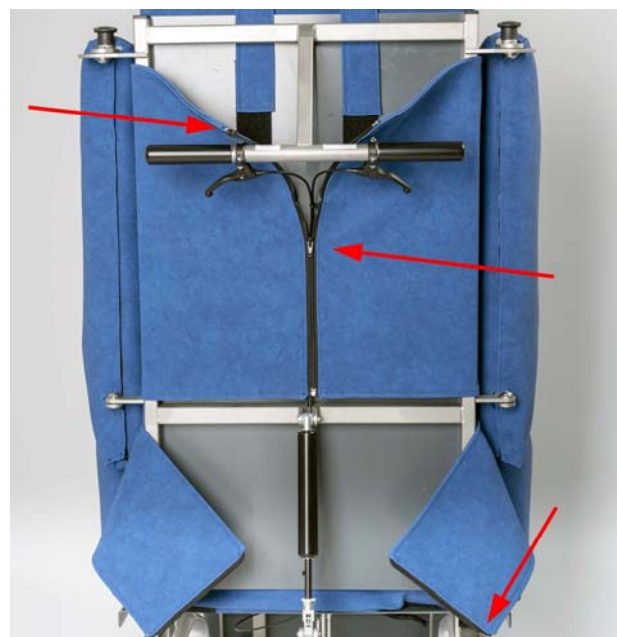

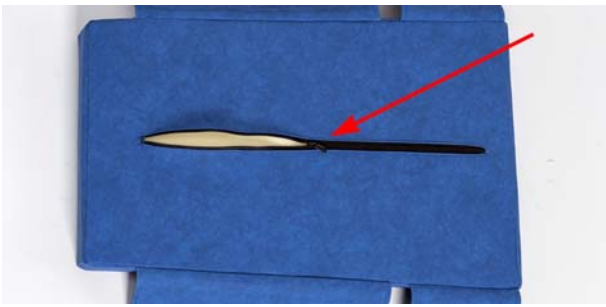

• Sitz- u. Beinpolster, abnehmbar
Das Polster kann zur Reinigung abgenommen werden. Im Bereich der Sitzfläche ist dieses beidseitig mit Klettband befestigt. Nach dem Lösen kann es nach unten über den Rahmen der Beinauflage abgenommen werden. Der Schaumstoff kann durch einen Reißverschluß auf der Unterseite entnommen werden. Reinigung siehe Kapitel 8.



• Räder Ø 100 mm Doppelradrollen
Beim Übersetzen einer Person müssen alle Feststellbremsen arretiert sein.
Der Stuhl ist standardmäßig mit hochwertigen Rollen ausgestattet. Durch nicht sachgerechte Nutzung wird deren Lebensdauer jedoch stark beeinträchtigt. Negativ ist es, wenn die Rollen mit einem höheren Gewicht belastet werden, als es für das Modell zulässig ist. Negativ wirkt sich auch der Einsatz auf einem ungeeigneten Untergrund aus, wodurch z. B. Fremdkörper in die Bandagen eindringen können. Der Stuhl darf nicht mit festgestellten Rollen gewaltsam bewegt werden. Die Rollen können bei groben Stoß- oder Fallbelastungen Schaden nehmen. Schädlich ist es auch, wenn der Stuhl mit zu hoher Geschwindigkeit bewegt wird (> 4 km/h) oder Veränderungen an den Rollen vorgenommen werden.



5 Zubehör

• Serviertisch
Der Serviertisch wird beidseitig eingesteckt. Mit den beidseitigen Sterngriffen kann der Tisch dann in der gewünschten Tiefe festgeklemmt werden. Wenn der Serviertisch nachträglich bestellt wird, dann müssen die zuvor werksseitig eingedrehten Schrauben durch die Sterngriffe ersetzt werden.



6 Technische Daten







Alle Maße sind in Millimetern angegeben.

Gesamtbreite:	720 mm
Gesamthöhe:	1.400 mm
Gesamtiefe:	1.100 mm
Sitzbreite:	480 mm
Sitztiefe:	600 mm
Sitzhöhe:	640 mm

RPS 480	
Gewicht:	60 kg
Maximale Belastbarkeit:	120 kg

7 Kennzeichnung

Auf dem Rahmen des Produktes befinden sich Etiketten mit den folgenden Symbolen:

	Medizinprodukt
	CE Kennzeichen
	Bestellnummer
	Seriennummer
	maximales Benutzergewicht kg
	Hersteller



Herstelldatum
JJJJ-MM

ab 01.01.2025

Beispiel:

UDI



Unique Device Identifier
Barcode GS1 DataMatrix

(01)04260629321092(21)202105673
(01)GTIN (21)SN

8 Reinigung und Desinfektion

Der Rahmen besteht aus nicht rostendem Edelstahl und ist zusätzlich mit einer hochwertigen Einbrennlackierung versiegelt. Er kann einfach mit warmem Wasser und herkömmlichen Reinigungsmitteln mittels Schwamm oder einem weichen Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie keine chlorhaltigen Reinigungsmittel und keine Stahlwolle oder Scheuermittel.

Polster mit Schaumstoffkern und einem Bezug aus dichtem, beschichtetem Textilgewebe:

Die Reinigung erfolgt mittels feuchtem Tuch, ggf. mit einer milden Seifenlösung. Nicht geeignet sind öl- oder fetthaltige Reinigungsmittel, sowie Lösemittel und Chloride. Eine Liste mit geeigneten Desinfektionsmitteln kann angefordert werden. Der Schaumstoffkern kann durch die Reißverschlussöffnung entnommen werden, Maschinenreinigung bis 95° C.

9 Wartung und Inspektion

Das Produkt ist wartungsfrei. Beachten Sie die beschriebenen Reinigungs- und Sicherheitsvorschriften.

Eine komplette Inspektion ist mindestens einmal jährlich durchzuführen. Hierbei muss insbesondere die Funktion der Verstellrichtungen und der Rasterbolzen geprüft werden. Bei den Rollen sind die Lauf- und Dreheigenschaften sowie die Funktion der Feststeller zu prüfen. Alle Komponenten sollten auf Sauberkeit und Unversehrtheit überprüft werden. Gegebenenfalls muss das Produkt bis nach der Reparatur außer Betrieb genommen werden.

Führen Sie vor jeder Verwendung des Produktes eine Sichtprüfung und eine Funktionsprüfung durch. Prüfen Sie insbesondere die Verstellrichtungen und die Dreheigenschaften der Rollen sowie die Funktion der Feststeller.

10 Lagerung, Wiedereinsatz u. Entsorgung

Lagerung: Lagern Sie das Produkt bei Temperaturen von 0 °C bis 40 °C in einer trockenen Umgebung bis max. 75% Luftfeuchtigkeit. Das Modell kann nicht zerlegt oder gefaltet werden.

Wiedereinsatz: Das Produkt ist für den wiederholten Einsatz geeignet. Die Häufigkeit ist von der Abnutzung und der Funktionstauglichkeit abhängig. Reinigen und desinfizieren Sie das Produkt entsprechend Kapitel 8. Geben Sie das Produkt nur weiter, wenn alle Komponenten ihre Funktionen erfüllen.

Entsorgung: Das Produkt beinhaltet keine gefährlichen Stoffe. Sie können das Produkt der lokalen Entsorgung zuführen.

11 Garantie / Haftung

Für das gelieferte RCN Produkt leisten wir dem Endabnehmer gegenüber Garantie zu den folgenden Bedingungen:

Die Garantiezeit beträgt generell 3 Jahre, für den Kunststoff- oder Metallrahmen beträgt sie 5 Jahre. Sie beginnt mit dem Zeitpunkt der Übergabe des Produkts an den Benutzer. Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg in Verbindung mit der Angabe der auf dem Produkt aufgetragenen Serien-Nummer.

Die Garantie umfasst die Beseitigung der innerhalb der Garantiezeit auftretenden Schäden oder Mängel am Produkt, die nachweislich auf Material- oder Fertigungsfehlern beruhen. Hiervon ausgenommen sind Teile, die einem natürlichen Verschleiß unterliegen. Wir behalten uns vor, die Garantieleistung durch Austausch oder Reparatur der beschädigten Teile zu erbringen. Nicht unter die Garantie fallen Schäden infolge unsachgemäßer Handhabung und Benutzung, durch Nichtbeachtung der hier enthaltenen Hinweise, bei Verwendung nicht geeigneter oder abrasiver Reinigungsmittel bzw. im Falle mutwilliger Beschädigung.

Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler/Handelspartner oder direkt an RCN. Falls das Produkt zum Zweck der Reparatur an uns versandt wird, geschieht dies auf Kosten und Gefahr des Absenders.

Berechtigte Garantieleistungen werden ohne jede Berechnung durchgeführt. Sie bewirken weder eine Verlängerung noch einen Neubeginn der Garantiezeit für das Produkt.

Weitergehende Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz von nicht am Produkt entstandenen Schäden, sind ausgeschlossen. Diese Garantie besteht zusätzlich und beeinträchtigt in keiner Weise gesetzliche oder andere Rechte von Endverbrauchern.

Wir betrachten es als unsere vorrangige Aufgabe, Produkte zu entwickeln und herzustellen, die den Bedürfnissen unserer Kunden bestmöglich entsprechen. Sagen Sie es uns, wenn Sie meinen, dass wir etwas ändern oder verbessern sollten und wenn Sie zufrieden sind, sagen Sie uns das auch, denn darüber freuen wir uns natürlich am meisten. Unsere Email-Adresse, Telefonnummer und Faxnummer sowie unsere Postanschrift finden Sie auf der ersten Seite.

Ihr RCN Team

Stand: 16.01.2024