




Reise-Multifunktions-Dusch- und Toilettenstuhl

SCC 250 R

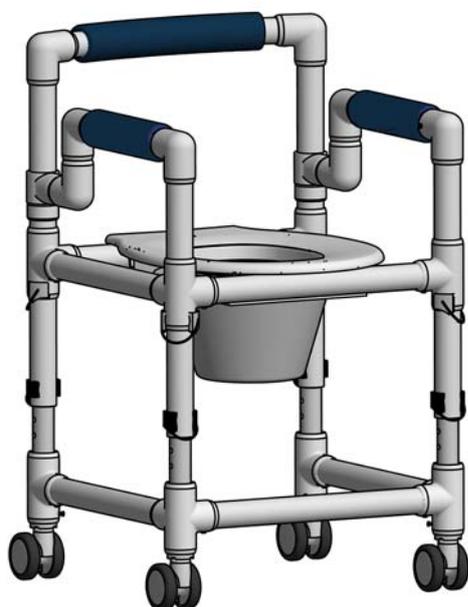

Inhalt

| | |
|--|---|
| 1 Einleitung | 1 |
| 2 Bestimmungsgemäße Verwendung | 1 |
| 3 Allgemeine Sicherheitsvorschriften | 1 |
| 4 Bedienung und Funktionen..... | 1 |
| 5 Zubehör | 3 |
| 6 Technische Daten..... | 3 |
| 7 Kennzeichnung..... | 4 |
| 8 Reinigung und Desinfektion..... | 4 |
| 9 Wartung und Inspektion..... | 4 |
| 10 Lagerung, Wiedereinsatz u. Entsorgung | 4 |
| 11 Garantie / Haftung | 5 |

1 Einleitung

Diese Gebrauchsanweisung enthält wichtige Informationen zur Anwendung des Produktes. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und befolgen Sie insbesondere die Sicherheitshinweise.

Sie finden die aktuelle Version der Gebrauchsanweisung als PDF auf unserer Webseite (www.rcn-medizin.de). Diese kann bei einer Sehschwäche vergrößert dargestellt werden.

2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Modell ist als Hilfsmittel zum Duschen, für den Toilettengang sowie für die persönliche Hygiene vorgesehen. Die Rückenlehne und die Armlehnen sorgen für eine stabile Sitzposition. Im zerlegten Zustand eignet sich das Produkt zur Mitnahme auf Reisen.

Indikation: Das Produkt unterstützt bei Einschränkungen der Mobilität oder des Gleichgewichtssinnes. Vorgesehene Benutzer sind

Erwachsene und Jugendliche. Kontraindikation: Unfähigkeit zum Sitzen.

Produktlebensdauer: Die voraussichtliche Lebensdauer beträgt 10 Jahre. Bei einzelnen Komponenten (z. B. Rädern und Polstern) kann je nach Verschleiß, ein früherer Austausch erforderlich sein. Durch den Einsatz von Ersatzteilen kann die Lebensdauer erhöht werden

3 Allgemeine Sicherheitsvorschriften

Verwenden Sie das Produkt nur auf ebenen Flächen im Innenbereich. Vermeiden Sie die selbstständige Fortbewegung durch Trippeln, da sich dabei die Füße unter dem Rahmen einklemmen könnten.

Verlagern Sie Ihr Gewicht nicht durch seitliches, frontales oder rückseitiges Neigen des Oberkörpers, wie z.B. beim Greifen nach Gegenständen. Dies kann zum Kippen des Modells führen.

Entfernen Sie nach jedem Gebrauch Seifenspuren vom Stuhl, um Unfällen aufgrund von Rutschgefahr vorzubeugen.

Das Modell ist dauerhaft mit einer Temperatur zwischen 0 °C und 60 °C belastbar. Aufgrund der Eigenschaften von Kunststoff können bei Belastung außerhalb dieses Temperaturbereiches Schäden auftreten. Setzen Sie das Produkt auch keinen punktuellen Wärmebelastungen wie z. B. Heizstrahlern aus. Überprüfen Sie das Produkt vor jeder Anwendung auf Schäden. Sollten Schäden vorhanden sein, nutzen Sie das Produkt bis zur Reparatur nicht mehr.

Alle schwerwiegenden Vorfälle im Zusammenhang mit diesem Produkt sind uns (Hersteller) und der zuständigen Behörde zu melden.

4 Bedienung und Funktionen

• Montage


Das Produkt wird teilmontiert in drei Teilen (+ Toiletteneimer) geliefert. Zunächst wird das Unterteil mit den Rollen auf den Fußboden gestellt. Anschließend wird die Sitzfläche auf die vier nach oben zeigenden Rohre des Unterteils aufgesetzt. Bewegen Sie dann die Sitzfläche bis auf die gewünschte Höhe und legen Sie die vier Sicherungsbügel unten um. Diese rasten beim weiteren Verschieben automatisch in der nächsten Rasterstellung ein.

Danach wird das Oberteil aufgesetzt. Hierfür müssen die Armlehnen im 90°-Winkel zur Rückenlehne ausgeschwenkt sein. Dann werden die Rohre in die vier freien Öffnungen rund um die Sitzfläche gesteckt und mithilfe der Sicherungsbügel arretiert.

Prüfen Sie dann durch Anheben des Stuhles an den Armlehnen, ob alle Bügel fest eingerastet sind.


Beachten Sie, dass die drei einzelnen Teile in der korrekten Richtung aufeinander gesetzt sind (siehe Abbildung).

- A: Sicherungsbügel geschlossen
- B: Sicherungsbügel offen

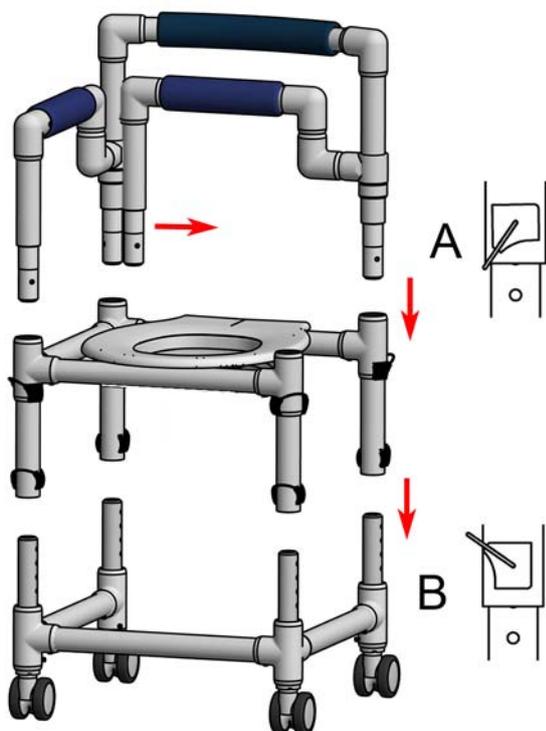

- Räder \varnothing 75 mm

Das Modell ist mit vier freidrehenden \varnothing 75 mm Doppelradrollen ausgerüstet. Alle Rollen haben eine Feststellbremse. Beim Übersetzen einer Person sowie beim Dusch- oder Toilettengang müssen alle Feststellbremsen arretiert sein.

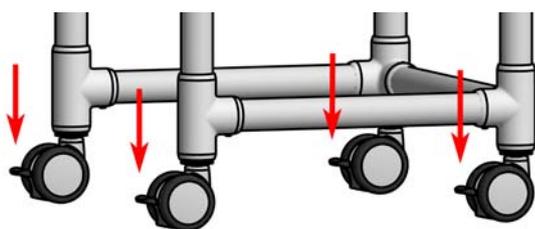


- Toilettenbrille

Die Toilettenbrille ist auf dem Sitzrahmen aufgesteckt und kann zum Reinigen hochgeklappt oder abgenommen werden. Der Topf wird bei Standard-Stühlen von der linken Seite eingeschoben. Dabei muss ggf. der Henkel parallel zur Einschubrichtung liegen.

- Toilettentopf TK

Der Toilettentopf aus Kunststoff (Polypropylen) ist temperaturbeständig bis 105 °C. Der Topf passt in alle Topfspüler und ist beständig gegen Desinfektionsmittel. Durch das Andrücken des Deckels wird ein Vakuum erzeugt, welches austretende Gerüche reduziert. Der Topf wird festgehalten, indem man mit den Fingern einer Hand unter den


Rand greift. Er hat auf der Innenseite eine Skala, um den Füllstand abzulesen. Das Einführen des Eimers erfolgt entsprechend der Abbildung.

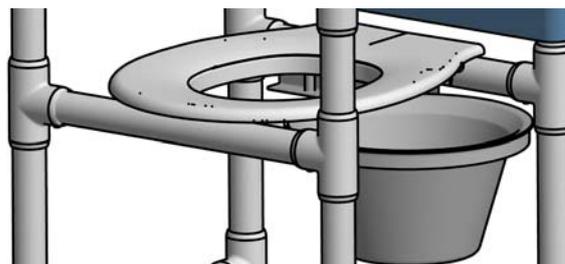

- ausschwenkbare Armlehne ASA

Sie erleichtert das Übersetzen des Benutzers in bzw. aus dem Stuhl. Lösen Sie dazu zuerst die Arretierung (1), indem Sie den Sicherungsbügel um 90° nach oben drehen. Heben Sie dann die Armlehne hinten am Drehgelenk an (2) und schwenken Sie sie nach außen (3). Das Arretieren erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Nach erfolgtem Transfer die Armlehne unbedingt immer arretieren! Achtung: Belasten Sie die Armlehne nicht im ausgeschwenkten Zustand!


- A: Sicherungsbügel geschlossen
- B: Sicherungsbügel offen

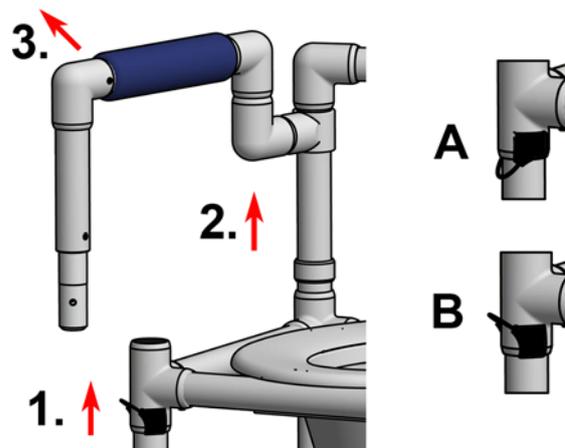

- Höhenverstellung HV

Sie dient der individuellen Einstellung der Sitzhöhe. Während der SitzhöhenEinstellung darf die Sitzfläche nicht belastet sein! Mit der Mehrfach-Höhenverstellung (Raster 25 mm) stellen Sie die gewünschte Sitzhöhe ein. Drehen Sie dazu alle vier Edelstahlbügel um ca. 90° nach oben; das Oberteil mit der Sitzfläche ist dann nach oben und unten frei beweglich. Bewegen Sie die Sitzfläche bis auf die gewünschte Höhe und legen Sie dann die Hebel alle wieder um. Die Hebel rasten beim weiteren Verschieben automatisch in der nächsten Rasterstellung ein.

Prüfen Sie dann durch Anheben des Stuhles an den Armlehnen, ob die Bügel fest in den Bohrungen eingerastet sind. Wurden die Bügel oberhalb der Höhenverstellung geschlossen, dann sitzt das Oberteil lose auf und wird alleine angehoben. Die Einstellung muss dann nach unten korrigiert werden.

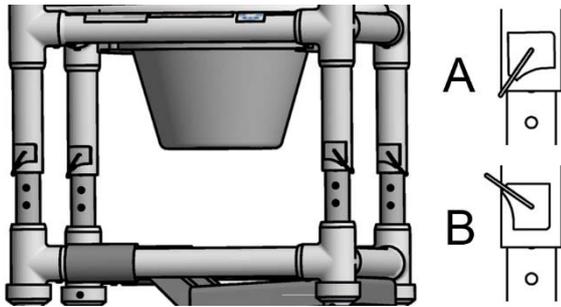

A: Sicherungsbügel geschlossen
 B: Sicherungsbügel offen


Achtung: Nach der Einstellung müssen alle Hebel wieder nach unten zeigen und eingerastet sein.

•Tasche
 Das Produkt wird in einer Tasche verpackt geliefert, in der man den Stuhl transportieren kann. Im zerlegten Zustand können alle Komponenten des Stuhls wieder in der Tasche verstaut werden. Dazu legen Sie die Tasche geöffnet auf den Boden. Zunächst wird die zusammengeklappte Arm- und Rückenlehne in der Mitte der Tasche platziert. Anschließend wird das Unterteil mit den Rollen nach unten so platziert, dass sich die Rollen in den Ecken der Tasche befinden. Dann kann das Mittelteil leicht versetzt neben das Unterteil gestellt werden. Der Eimer kann zwischen die Rahmengestelle auf den Boden der Tasche gestellt werden. Dazu muss die Sitzfläche nach oben geklappt werden. Die Sitzfläche wird zum Schluss auf die anderen Teile geklappt und die Tasche mithilfe des Reißverschlusses geschlossen.




5 Zubehör



• Sitzpolster
 Das Sitzpolster mit Schaumstoffkern und einem Bezug aus dichtem, beschichtetem Textilgewebe ist mit Druckknöpfen auf einer Sitzplatte befestigt. Die Platte wird einfach auf die Toilettenbrille aufgelegt. Dabei müssen die enger zusammenliegenden Fixierstopfen vorne sein. Zum Duschen muss das Polster komplett abgenommen werden.

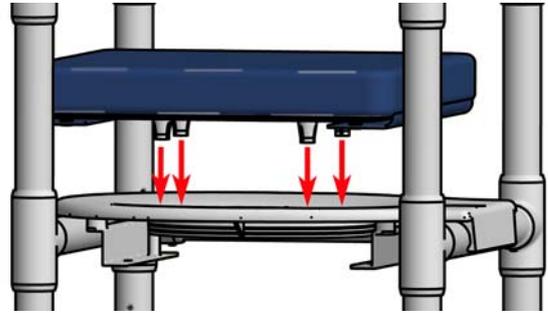

6 Technische Daten

Alle Maße sind in Millimetern angegeben.

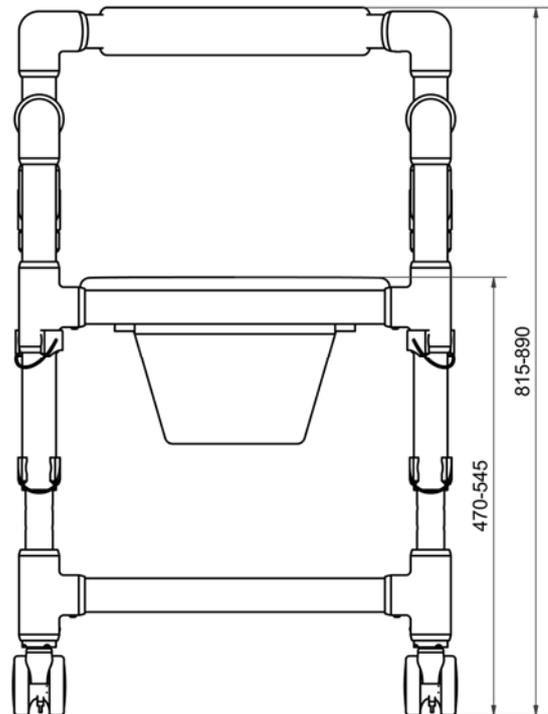

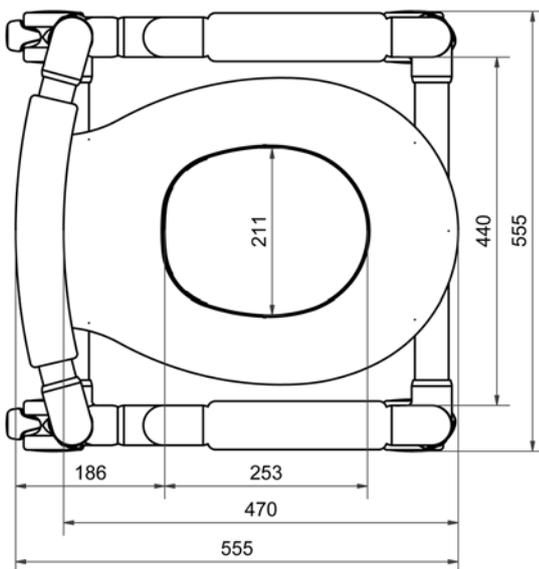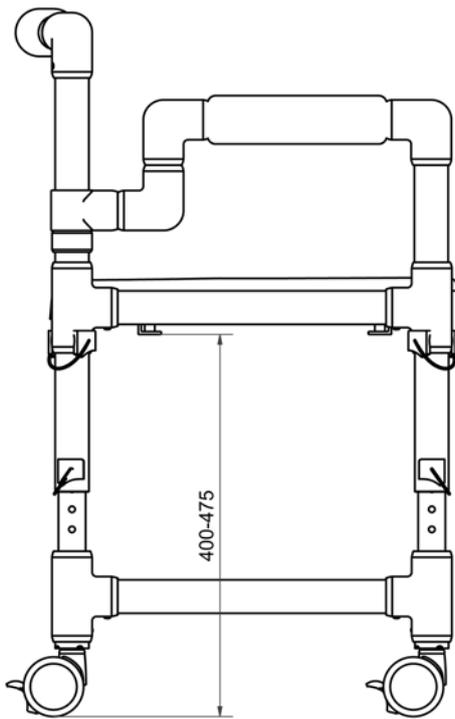

SCC 250 R
 Gewicht: 12,3 kg
 Maximale Belastbarkeit: 150 kg

7 Kennzeichnung

Auf dem Rahmen des Produktes befinden sich Etiketten mit den folgenden Symbolen:

| | |
|---|----------------|
|  | Medizinprodukt |
|  | CE Kennzeichen |
|  | Bestellnummer |
|  | Seriennummer |



maximales
Benutzergewicht kg



Hersteller



Herstelldatum
JJJJ-MM

ab 01.01.2025

Beispiel:



Unique Device Identifier
Barcode GS1 DataMatrix

(01)04260629321092(21)202105673
 (01)GTIN (21)SN

8 Reinigung und Desinfektion

Das Produkt kann einfach mit warmem Wasser, max. 60 °C, und haushaltsüblichen Reinigungsmitteln gereinigt werden. Verwenden Sie dazu einen Schwamm oder ein weiches Tuch. Achtung: Verwenden Sie keine Stahlwolle und keine Scheuermittel! Für die manuelle Aufbereitung wischen Sie alle Komponenten mit einem farblosen Flächen-Desinfektionsmittel ab, das für Kunststoffe geeignet ist. Beachten Sie die Hinweise zu den Einwirkzeiten und zur sicheren Anwendung des Desinfektionsmittel-Herstellers.

Sunsure®-Gewebe: Kann bis 60° C in der Waschmaschine gereinigt werden. Nicht schleudern, nicht chemisch reinigen und nur durch Aufhängen trocknen. Geeignet für farblose Desinfektionsmittel.

9 Wartung und Inspektion

Das Produkt ist wartungsfrei. Beachten Sie die beschriebenen Reinigungs- und Sicherheitsvorschriften.

Eine komplette Inspektion ist mindestens einmal jährlich durchzuführen. Hierbei muss der korrekte und feste Sitz der Verbindungen geprüft werden. Ebenso müssen alle Verbindungselemente auf Rissbildungen untersucht werden. Gegebenenfalls muss das Produkt bis nach der Reparatur außer Betrieb genommen werden. Technisch geschulte Personen können Reparaturen auch selbst durchführen. Fragen Sie nach unseren Reparaturanleitungen.

Führen Sie vor jeder Verwendung des Produktes eine Sichtprüfung und eine Funktionsprüfung durch. Prüfen Sie insbesondere die Laufeigenschaften und die Dreheigenschaften der Rollen sowie die Funktion der Feststellbremsen.

10 Lagerung, Wiedereinsatz u. Entsorgung

Lagerung: Lagern Sie das Produkt bei Temperaturen von 0 °C bis 40 °C in einer trockenen Umgebung bis max. 75% Luftfeuchtigkeit. Das Modell kann nicht zerlegt oder gefaltet werden.

Wiedereinsatz: Das Produkt ist für den wiederholten Einsatz geeignet. Die Häufigkeit ist von der Abnutzung und der Funktionstauglichkeit abhängig. Reinigen und desinfizieren Sie das Produkt entsprechend Kapitel 8. Geben Sie das Produkt nur

weiter, wenn alle Komponenten ihre Funktionen erfüllen.

Entsorgung: Das Produkt beinhaltet keine gefährlichen Stoffe. Sie können das Produkt der lokalen Entsorgung zuführen.

11 Garantie / Haftung

Für das gelieferte RCN Produkt leisten wir dem Endabnehmer gegenüber Garantie zu den folgenden Bedingungen:

Die Garantiezeit beträgt generell 3 Jahre, für den Kunststoff- oder Metallrahmen beträgt sie 5 Jahre. Sie beginnt mit dem Zeitpunkt der Übergabe des Produkts an den Benutzer. Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg in Verbindung mit der Angabe der auf dem Produkt aufgebrachten Serien-Nummer.

Die Garantie umfasst die Beseitigung der innerhalb der Garantiezeit auftretenden Schäden oder Mängel am Produkt, die nachweislich auf Material- oder Fertigungsfehlern beruhen. Hiervon ausgenommen sind Teile, die einem natürlichen Verschleiß unterliegen. Wir behalten uns vor, die Garantieleistung durch Austausch oder Reparatur der beschädigten Teile zu erbringen. Nicht unter die Garantie fallen Schäden infolge unsachgemäßer Handhabung und Benutzung, durch Nichtbeachtung der hier enthaltenen Hinweise, bei Verwendung nicht geeigneter oder abrasiver Reinigungsmittel bzw. im Falle mutwilliger Beschädigung.

Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler/Handelspartner oder direkt an RCN. Falls das Produkt zum Zweck der Reparatur an uns versandt wird, geschieht dies auf Kosten und Gefahr des Absenders.

Berechtigte Garantieleistungen werden ohne jede Berechnung durchgeführt. Sie bewirken weder eine Verlängerung noch einen Neubeginn der Garantiezeit für das Produkt.

Weitergehende Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz von nicht am Produkt entstandenen Schäden, sind ausgeschlossen. Diese Garantie besteht zusätzlich und beeinträchtigt in keiner Weise gesetzliche oder andere Rechte von Endverbrauchern.

Wir betrachten es als unsere vorrangige Aufgabe, Produkte zu entwickeln und herzustellen, die den Bedürfnissen unserer Kunden bestmöglich entsprechen. Sagen Sie es uns, wenn Sie meinen, dass wir etwas ändern oder verbessern sollten und wenn Sie zufrieden sind, sagen Sie uns das auch, denn darüber freuen wir uns natürlich am meisten. Unsere Email-Adresse, Telefonnummer und Faxnummer sowie unsere Postanschrift finden Sie auf der ersten Seite.

Ihr RCN Team

Stand: 24.02.2023