




Strandmobil SM 700 FBS SBS

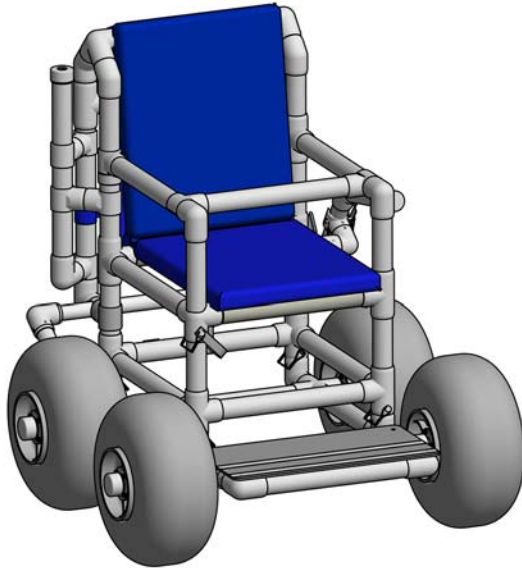

Inhalt

1 Einleitung	1
2 Bestimmungsgemäße Verwendung	1
3 Allgemeine Sicherheitsvorschriften	1
4 Bedienung und Funktionen.....	1
5 Zubehör	3
6 Technische Daten.....	3
7 Kennzeichnung.....	3
8 Reinigung und Desinfektion.....	4
9 Wartung und Inspektion.....	4
10 Lagerung, Wiedereinsatz u. Entsorgung	4
11 Garantie / Haftung	4

1 Einleitung

Diese Gebrauchsanweisung enthält wichtige Informationen zur Anwendung des Produktes. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und befolgen Sie insbesondere die Sicherheitshinweise.

2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Modell dient als Transportmittel auf weichen und unebenen Untergründen (z.B. Strand). Die Befahrung von Wasser (auch Salzwasser) ist mit dem Strandmobil bis zu einer Wasserhöhe von 10 cm möglich. Die Fortbewegung mit dem Schieberollstuhl ist nur mithilfe einer Begleitperson möglich. Die Rückenlehne, die Armlehnen und der Sicherheitsbügel sorgen für eine stabile Sitzposition.

Indikation: Das Produkt unterstützt bei Einschränkungen der Mobilität oder des Gleichgewichtssinnes. Vorgesehene Benutzer sind Erwachsene und Jugendliche. Durch ein

zusätzliches Ausstattungssset kann das Produkt auch von Kindern ab 7 Jahren genutzt werden. Kontraindikation: Unfähigkeit zum Sitzen.

Produktlebensdauer: Die voraussichtliche Lebensdauer beträgt 10 Jahre. Bei einzelnen Komponenten (z. B. Rädern und Polstern) kann je nach Verschleiß, ein früherer Austausch erforderlich sein. Durch den Einsatz von Ersatzteilen kann die Lebensdauer erhöht werden.

3 Allgemeine Sicherheitsvorschriften

Das Produkt ist für den Einsatz auf weichen und unebenen Untergründen geeignet. Mit dem Produkt dürfen keine unebenen Flächen oder Schnee befahren werden. Der Nutzer darf nur in sitzender Position auf dem Produkt befördert werden. Die Fortbewegung ist nur durch Schieben einer Begleitperson möglich.

Steigungen des Untergrunds dürfen bis maximal 5 % befahren werden. Während des Schiebens muss der Sicherheitsbügel geschlossen sein, um die sitzende Person vor dem Herausfallen zu schützen.

Die Fußstütze dient zum Abstellen bzw. Ablegen der Füße und kann mit dem vollen Körpergewicht des Nutzers belastet werden.


Das Modell ist dauerhaft mit einer Temperatur zwischen 0 °C und 60 °C belastbar. Aufgrund der Eigenschaften von Kunststoff können bei Belastung außerhalb dieses Temperaturbereiches Schäden auftreten. Setzen Sie das Produkt auch keinen punktuellen Wärmebelastungen wie z. B. Heizstrahlern aus. Überprüfen Sie das Produkt vor jeder Anwendung auf Schäden. Sollten Schäden vorhanden sein, nutzen Sie das Produkt bis zur Reparatur nicht mehr.

Alle schwerwiegenden Vorfälle im Zusammenhang mit diesem Produkt sind uns (Hersteller) und der zuständigen Behörde zu melden.

4 Bedienung und Funktionen


Zur Reduzierung des Transportvolumens wird das Strandmobil teilmontiert geliefert. Vor Benutzung müssen die Reifen auf den Achsen des Unterteils montiert werden. Dafür müssen die Reifen einzeln auf die Achsen gesetzt werden und von außen mit den beiliegenden Muttern verschraubt werden. Anschließend wird das Oberteil auf das Unterteil aufgesetzt und befestigt. Dazu werden die Bolzen gleichzeitig durch die Löcher in Oberteil und Unterteil gesteckt, um diese miteinander zu verbinden. Alle Bolzen müssen anschließend geschlossen werden, indem man den Bügel über das offene, herausstehende Ende des Bolzens zieht. Die Köpfe der Sicherungsbolzen auf der Seite der Fußstütze müssen nach außen zeigen. Achten Sie darauf, dass die Sitzfläche nach vorne zeigt, genauso wie die Fußstütze. Die Montage erfolgt werkzeuglos. Zum Transport kann das Strandmobil wieder demontiert werden, indem man die

beschriebenen Schritte in umgekehrter Reihenfolge macht (siehe Abbildung).

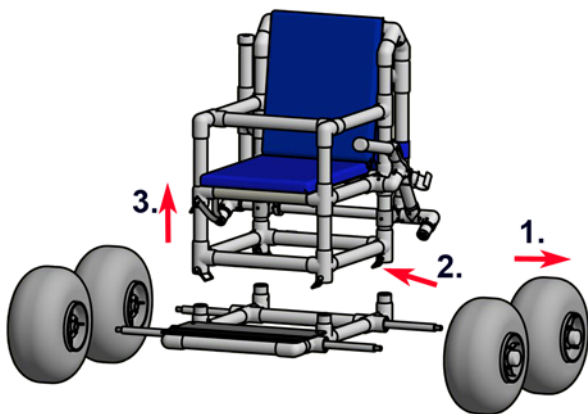

• **Reifen**
Das Produkt ist mit 4 großen Niederdruck-Ballonreifen ausgestattet. Diese ermöglichen die einfache Befahrung von weichen Untergründen, wie z.B. Sand. Vor jedem Gebrauch ist der Luftdruck der Reifen zu überprüfen.
Die Reifen haben ein Ventil vom Typ AV (Autoventil).
Der Luftdruck muss vor jedem Einsatz überprüft werden. Der Luftdruck muss 0,15 – 0,2 bar betragen.

• **Feststellbremse**
Mit der Feststellbremse kann das Produkt gegen wegrollen gesichert werden. Während das Produkt rollt, darf die Bremse nicht ruckartig betätigt werden, um ein Herausfallen des Nutzers und das Umkippen des Produkts zu verhindern.
Im geöffneten Zustand wird die Bremse in der hinteren Halterung befestigt (rechtes Bild). Zum Schließen wird die Bremse nach unten gedrückt und in der vorderen Halterung befestigt. Zusätzlich muss der Bolzen an der Bremse bei längerem Stand geschlossen sein (linkes Bild).

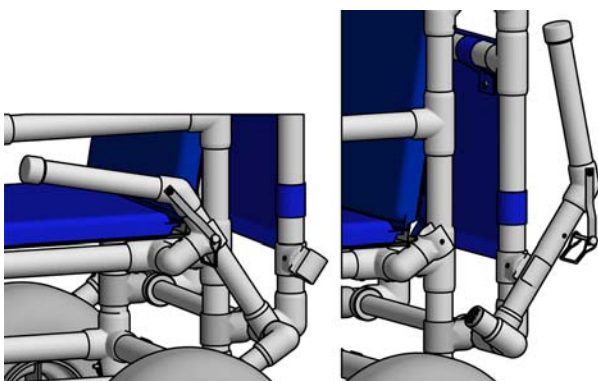


Bremse zu

Bremse auf


• **ausschwenkbare Armlehne ASA**
Sie erleichtert das Übersetzen des Benutzers in bzw. aus dem Stuhl. Lösen Sie dazu zuerst die Arretierung, indem Sie den Bügel vom Bolzen lösen (1). Heben Sie dann die Armlehne hinten am Drehgelenk an (2) und schwenken Sie sie nach außen (3). Das Arretieren erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Nach erfolgtem Transfer die Armlehne

unbedingt immer arretieren! Achtung: Belasten Sie die Armlehne nicht im ausgeschwenkten Zustand!

A: Sicherungsbügel geschlossen
B: Sicherungsbügel offen

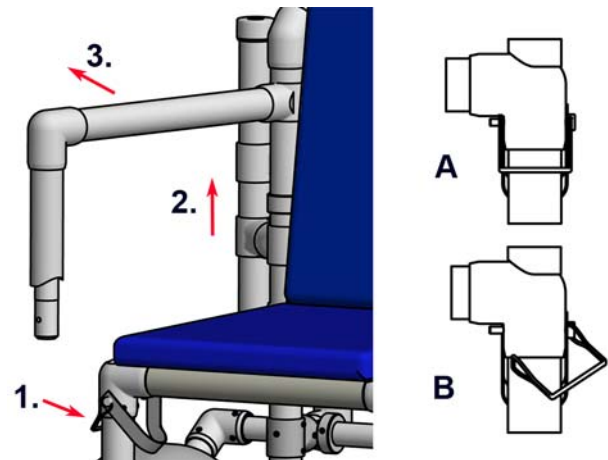


• **Utensilentasche**
Die Utensilentasche aus Sunsure® ist mit Druckknöpfen am Rücken des Produkts befestigt und kann problemlos abgenommen werden. Die Tasche hat ein Innenmaß von ca. 37 x 8 x 37 cm.

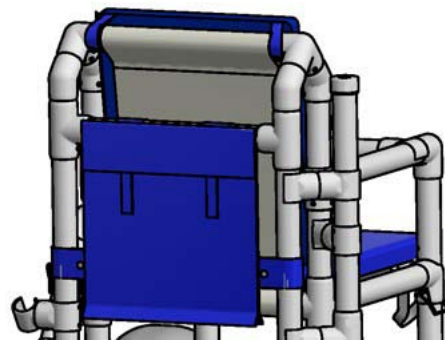

• **Sitzpolster und Rückenpolster**
Das einteilige Polster für die Sitzfläche und den Stuhl Rücken wird mit Druckknöpfen am oberen Querrohr befestigt. Die Schaumstoffkerne können durch einen Reisverschluss seitlich entnommen werden.


• **Sicherheitsbügel SB**
Dieser dient als zusätzlicher Haltegriff. Der Sicherheitsbügel ist drehbar an einer Armlehne befestigt. Der Bügel wird geschlossen, indem er mit dem halboffenen Ende auf die gegenüberliegende Armlehne gedrückt wird. Er befindet sich dann waagrecht vor der im Stuhl sitzenden Person. Er stellt jedoch keine Fixierung dar, weil er von dieser jederzeit geöffnet werden kann.
Die Öffnung erfolgt am einfachsten indem man mit der Hand unter den Bügel greift und mit dem Daumen von oben auf die Armlehne drückt.
Achtung: Der Sicherheitsbügel dient als zusätzlicher Schutz während des Transports und gibt dem Benutzer die Möglichkeit, sich bequem daran festzuhalten. Der Bügel ist jedoch keine absolute Sicherung gegen Herausrutschen oder Herausfallen.

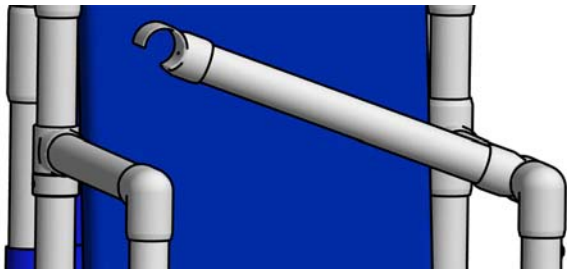

5 Zubehör




• Sonnenschirmhalter SO

Die Halterung für den Sonnenschirm kann auf der rechten Seite des Produkts montiert werden. Dazu muss die Halterung auf das Rohr am Strandmobil aufgesteckt und festgedrückt werden. Anschließend kann ein Sonnenschirm in der Halterung fixiert werden. Die Montage erfolgt werkzeuglos.

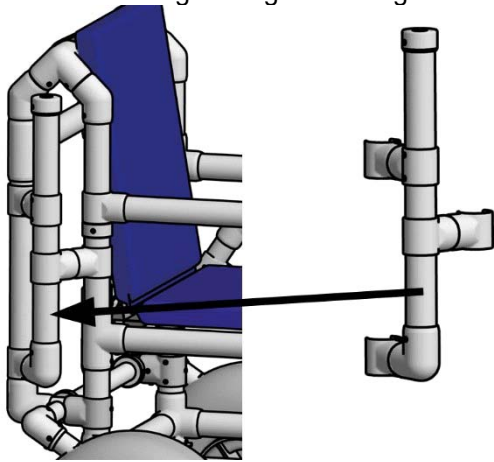

6 Technische Daten

Alle Maße sind in Millimetern angegeben.

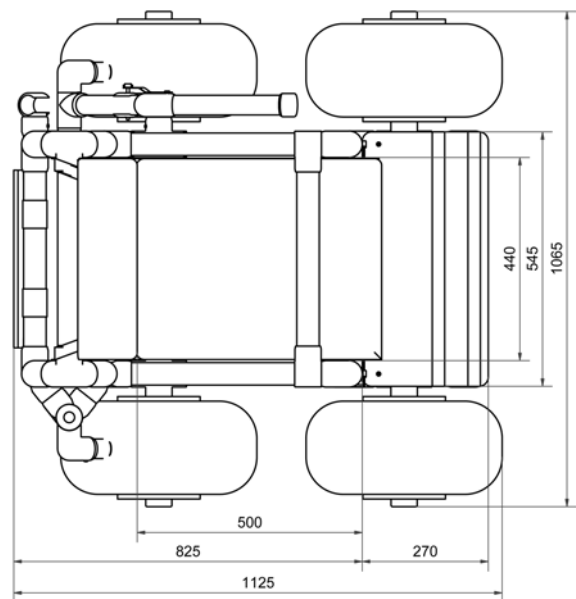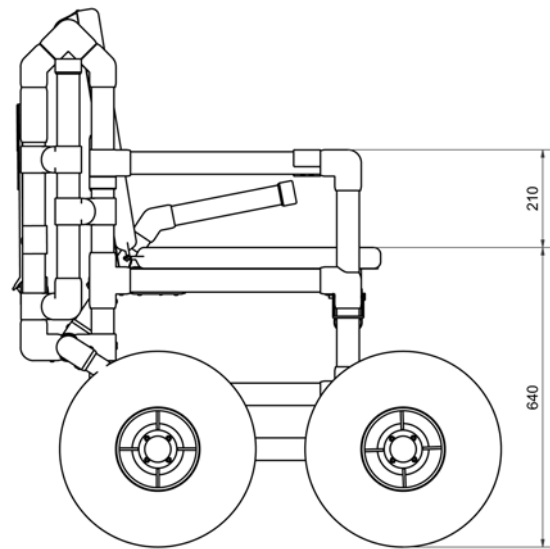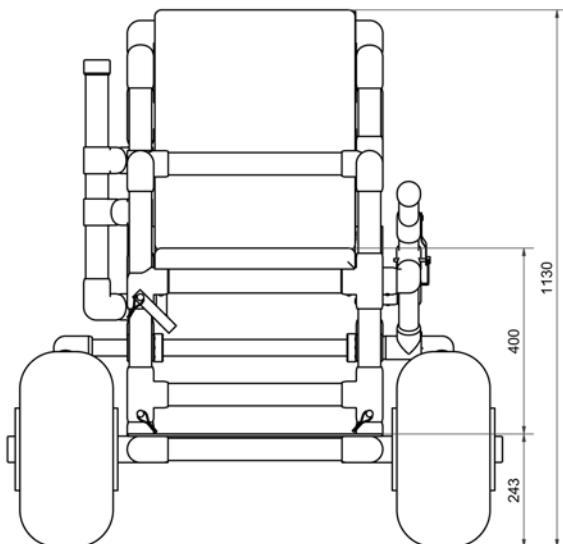

SM 700 FBS SBS

Gewicht:	40,0 kg
Maximale Belastbarkeit:	150 kg
Reifendruck	0,15 – 0,2 bar

7 Kennzeichnung

Auf dem Rahmen des Produktes befinden sich Etiketten mit den folgenden Symbolen:



Medizinprodukt



CE Kennzeichen



Bestellnummer



Seriennummer



maximales
Benutzergewicht kg



Hersteller



Herstelltdatum
JJJJ-MM

ab 01.01.2025



Unique Device Identifier
Barcode GS1 DataMatrix

(01)
04260629321092
(21) 202105673

(01) GTIN (Bsp.)
(02) Seriennummer (Bsp.)

8 Reinigung und Desinfektion

Das Produkt kann einfach mit warmem Wasser, max. 60 °C, und haushaltsüblichen Reinigungsmitteln gereinigt werden. Verwenden Sie dazu einen Schwamm oder ein weiches Tuch. Achtung: Verwenden Sie keine Stahlwolle und keine Scheuermittel! Für die manuelle Aufbereitung wischen Sie alle Komponenten mit einem farblosen Flächen-Desinfektionsmittel ab, das für Kunststoffe geeignet ist. Beachten Sie die Hinweise zu den Einwirkzeiten und zur sicheren Anwendung des Herstellers.

Sunsure®-Gewebe: Kann bis 60° C in der Waschmaschine gereinigt werden. Nicht schleudern, nicht chemisch reinigen und nur durch Aufhängen trocknen. Geeignet für farblose Desinfektionsmittel. Damit die Leichtgängigkeit der ausschwenkbaren Armlehne erhalten bleibt, reinigen Sie bitte die Zwischenräume nach Bedarf Abspülen mit einem starken Wasserstrahl. Das Einsprühen der Gleitflächen mit Silikonspray fördert die Leichtgängigkeit.

Der Schaumstoff kann mittels Reisverschluss entnommen werden und bei bis zu 95° in der Waschmaschine gereinigt werden. Das Salzwasser muss nach jeder Anwendung gründlich abgespült werden.

9 Wartung und Inspektion

Das Produkt ist wartungsfrei, wenn die beschriebenen Reinigungs- und Sicherheitsvorschriften beachtet werden.

Eine komplette Inspektion ist mindestens einmal jährlich durchzuführen. Hierbei muss der korrekte und feste Sitz der Verbindungen geprüft werden. Ebenso müssen alle Verbindungselemente auf Rissbildungen untersucht werden. Gegebenenfalls muss das Produkt bis nach der Reparatur außer Betrieb genommen werden.

Vor jeder Benutzung ist der Luftdruck in den Rädern und die Funktion der Feststellbremse zu prüfen.

10 Lagerung, Wiedereinsatz u. Entsorgung

Lagerung: Lagern Sie das Produkt bei Temperaturen von 0 °C bis 40 °C in einer trockenen Umgebung bis max. 75% Luftfeuchtigkeit. Das Modell kann nicht zerlegt oder gefaltet werden.

Wiedereinsatz: Das Produkt ist für den wiederholten Einsatz geeignet. Die Häufigkeit ist von der Abnutzung und der Funktionstauglichkeit abhängig. Reinigen und desinfizieren Sie das Produkt entsprechend Kapitel 8. Geben Sie das Produkt nur

weiter, wenn alle Komponenten ihre Funktionen erfüllen.

Entsorgung: Das Produkt beinhaltet keine gefährlichen Stoffe. Sie können das Produkt der lokalen Entsorgung zuführen.

11 Garantie / Haftung

Für das gelieferte RCN Produkt leisten wir dem Endabnehmer gegenüber Garantie zu den folgenden Bedingungen:

Die Garantiezeit beträgt generell 3 Jahre, für den Kunststoff- oder Metallrahmen beträgt sie 5 Jahre. Sie beginnt mit dem Zeitpunkt der Übergabe des Produkts an den Benutzer. Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg in Verbindung mit der Angabe der auf dem Produkt aufgetragenen Serien-Nummer.

Die Garantie umfasst die Beseitigung der innerhalb der Garantiezeit auftretenden Schäden oder Mängel am Produkt, die nachweislich auf Material- oder Fertigungsfehlern beruhen. Hiervon ausgenommen sind Teile, die einem natürlichen Verschleiß unterliegen. Wir behalten uns vor, die Garantieleistung durch Austausch oder Reparatur der beschädigten Teile zu erbringen. Nicht unter die Garantie fallen Schäden infolge unsachgemäßer Handhabung und Benutzung, durch Nichtbeachtung der hier enthaltenen Hinweise, bei Verwendung nicht geeigneter oder abrasiver Reinigungsmittel bzw. im Falle mutwilliger Beschädigung.

Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler/Handelspartner oder direkt an RCN. Falls das Produkt zum Zweck der Reparatur an uns versandt wird, geschieht dies auf Kosten und Gefahr des Absenders.

Berechtigte Garantieleistungen werden ohne jede Berechnung durchgeführt. Sie bewirken weder eine Verlängerung noch einen Neubeginn der Garantiezeit für das Produkt.

Weitergehende Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz von nicht am Produkt entstandenen Schäden, sind ausgeschlossen. Diese Garantie besteht zusätzlich und beeinträchtigt in keiner Weise gesetzliche oder andere Rechte von Endverbrauchern.

Wir betrachten es als unsere vorrangige Aufgabe, Produkte zu entwickeln und herzustellen, die den Bedürfnissen unserer Kunden bestmöglich entsprechen. Sagen Sie es uns, wenn Sie meinen, dass wir etwas ändern oder verbessern sollten und wenn Sie zufrieden sind, sagen Sie uns das auch, denn darüber freuen wir uns natürlich am meisten. Unsere Email-Adresse, Telefonnummer und Faxnummer sowie unsere Postanschrift finden Sie auf der ersten Seite.

Ihr RCN Team

Stand: 27.04.2023