



Transportstuhl TC 450 MRT



Inhalt	
1 Einleitung	1
2 Bestimmungsgemäße Verwendung	1
3 Allgemeine Sicherheitsvorschriften	1
4 Bedienung und Funktionen	1
5 Zubehör	3
6 Technische Daten.....	3
7 Kennzeichnung.....	3
8 Reinigung und Desinfektion.....	3
9 Wartung und Inspektion.....	4
10 Lagerung, Wiedereinsatz u. Entsorgung	4
11 Garantie / Haftung	4

1 Einleitung

Diese Gebrauchsanweisung enthält wichtige Informationen zur Anwendung des Produktes. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und befolgen Sie insbesondere die Sicherheitshinweise.

2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der TC 450 MRT ist für den Patiententransfer im MRT-Bereich bis 3 Tesla ausgelegt.
Der Transportstuhl darf nur innerhalb von Gebäuden auf ebenen Böden eingesetzt werden. Das Modell ist nicht geeignet, um damit Stufen zu überwinden. Das Modell ist für die kurzfristige Anwendung ausgelegt. Individuelle Anpassungen können nicht vorgenommen werden.
Produktlebensdauer: Die voraussichtliche Lebensdauer des Rollstuhls beträgt 10 Jahre. Bei

einzelnen Komponenten (z. B. Rädern und Polstern) kann je nach Verschleiß, ein früherer Austausch erforderlich sein. Durch den Einsatz von Ersatzteilen kann die Lebensdauer erhöht werden.

3 Allgemeine Sicherheitsvorschriften

Verwenden Sie das Produkt nur auf ebenen Flächen im Innenbereich. Achten Sie bei der Nutzung als Transferhilfe darauf, dass sich die Arme des Patienten auf den Armlehnen befinden oder der Patient sie vor dem Körper hält. Der Rücken des Patienten sollte sich an der Rückenlehne befinden, um eine stabile Sitzposition einzunehmen. Die Füße müssen auf der ausgezogenen Fußstütze stehen.


Das Modell ist dauerhaft mit einer Temperatur zwischen 0 °C und 60 °C belastbar. Aufgrund der Eigenschaften von Kunststoff können bei Belastung außerhalb dieses Temperaturbereiches Schäden auftreten. Setzen Sie das Produkt auch keinen punktuellen Wärmebelastungen wie z. B. Heizstrahlern aus. Überprüfen Sie das Produkt vor jeder Anwendung auf Schäden. Sollten Schäden vorhanden sein, nutzen Sie das Produkt bis zur Reparatur nicht mehr.

Alle schwerwiegenden Vorfälle im Zusammenhang mit diesem Produkt sind uns (Hersteller) und der zuständigen Behörde zu melden.

4 Bedienung und Funktionen

Der Transportstuhl wird zur Reduzierung der Versandkosten teilmontiert geliefert. Montieren Sie den Stuhl wie folgt:

1. Rückenlehne aufstecken
2. 4 x Schraube eindrehen (PH2)
3. Polsterrücken aufstecken

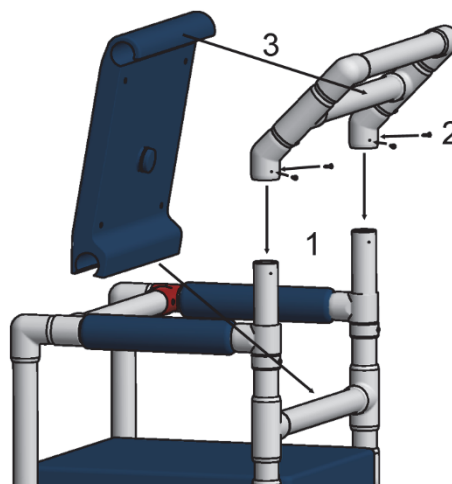


- ausschwenkbare Armlehne ASA

Sie erleichtert das Übersetzen des Benutzers in bzw. aus dem Stuhl. Lösen Sie dazu zuerst die Arretierung (1), indem Sie den roten Kunststoffbügel um 90° nach oben drehen. Heben Sie dann die Armlehne hinten am Drehgelenk an (2) und schwenken Sie sie nach außen (3). Das Arretieren erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Nach erfolgtem Transfer die Armlehne unbedingt immer arretieren! Achtung: Belasten Sie die Armlehne nicht im ausgeschwenkten Zustand!

A: Sicherungsbügel geschlossen


B: Sicherungsbügel offen

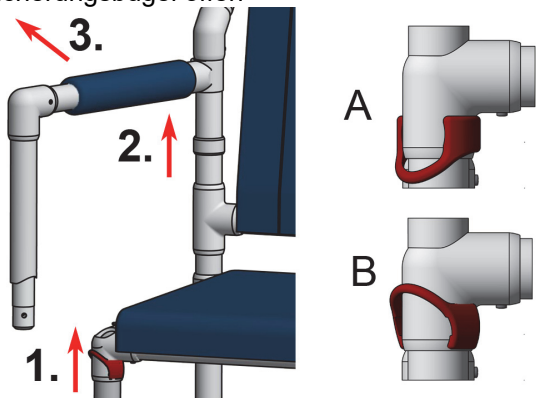

- Armpolster

Die Armpolster aus Polyurethanschaum können einfach abgenommen werden:

1. Lösen Sie die zwei Schrauben (PH2)
2. Ziehen Sie den vorderen Teil der Armlehne ab (Armlehne dazu schwenken)
3. Ziehen Sie das Armpolster ab

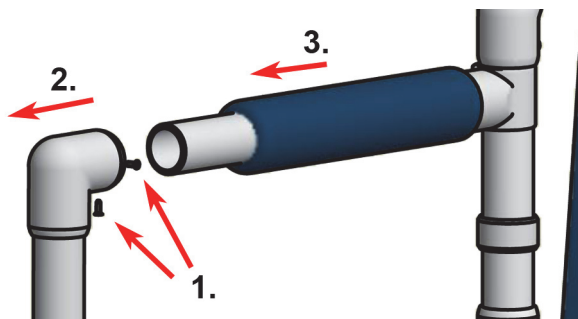

- Sicherheitsbügel SB

Dieser dient als zusätzlicher Haltegriff. Der Sicherheitsbügel ist drehbar an einer Armlehne befestigt. Der Bügel wird geschlossen, indem er mit dem halboffenen Ende auf die gegenüberliegende Armlehne gedrückt wird. Er befindet sich dann waagrecht vor der im Stuhl sitzenden Person. Er stellt jedoch keine Fixierung dar, weil er von dieser jederzeit geöffnet werden kann.

Die Öffnung erfolgt am einfachsten indem man mit der Hand unter den Bügel greift und mit dem Daumen von oben auf die Armlehne drückt.


Achtung: Der Sicherheitsbügel dient als zusätzlicher Schutz während des Transports und gibt dem Benutzer die Möglichkeit, sich bequem daran festzuhalten. Der Bügel ist jedoch keine absolute Sicherung gegen Herausrutschen oder Herausfallen.



- Räder Ø 100 mm Doppelradrollen


Beim Übersetzen einer Person müssen alle Feststellbremsen arretiert sein.

Der Stuhl ist standardmäßig mit hochwertigen Rollen ausgestattet. Durch nicht sachgerechte Nutzung wird deren Lebensdauer jedoch stark beeinträchtigt. Negativ ist es, wenn die Rollen mit einem höheren Gewicht belastet werden, als es für das Modell zulässig ist. Negativ wirkt sich auch der Einsatz auf einem ungeeigneten Untergrund aus, wodurch z. B. Fremdkörper in die Bandagen eindringen können. Der Stuhl darf nicht mit festgestellten Rollen gewaltsam bewegt werden. Die Rollen können bei groben Stoß- oder Fallbelastungen Schaden nehmen. Schädlich ist es auch, wenn der Stuhl mit zu hoher Geschwindigkeit bewegt wird (> 4 km/h) oder Veränderungen an den Rollen vorgenommen werden.

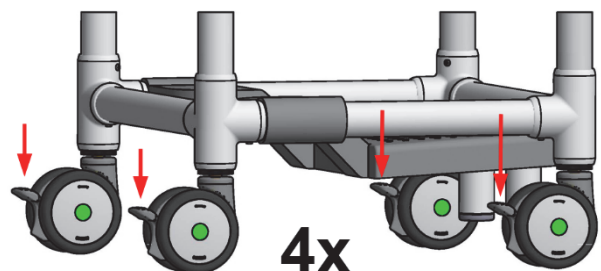

- Ausziehbare Fußstütze FT

Die Fußstütze dient zum Aufstellen der Füße. Die Fußstütze ist an den unteren Rahmenholmen gleitend befestigt; so lässt sie sich einfach durch Vorziehen bzw. Zurückschieben in Position bringen. Die unter der Fußstütze angebrachten, mit rutschhemmenden Füßen versehenen Stützholme machen die Fußstütze trittstabil und verhindern, dass der Stuhl nach vorne kippt. Bei nachträglicher Ausstattung mit größeren Rollen müssen auch die Stützholme verlängert werden.

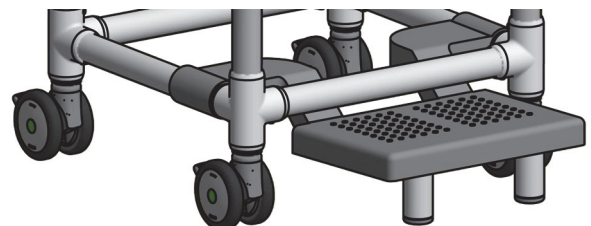

- Polsterrücken PR

Der Polsterrücken erhöht den Sitzkomfort. Er wird einfach auf den unteren Holm gedrückt und dann über den oberen Holm mit leicht nach oben gezogener Lippe gedrückt. Ebenso leicht kann der Polsterrücken zur Reinigung abgenommen werden.

• Polstersitz PUS




Der Sitz aus Polyurethanschaum bietet einen erhöhten Sitzkomfort. Der Sitz wird einfach auf den Sitzrahmen des Stuhls aufgelegt und kann zur Reinigung abgenommen werden.

5 Zubehör

Kein Zubehör.

6 Technische Daten

Alle Maße sind in Millimetern angegeben.

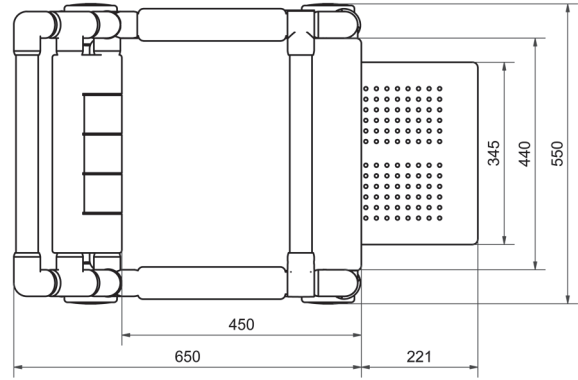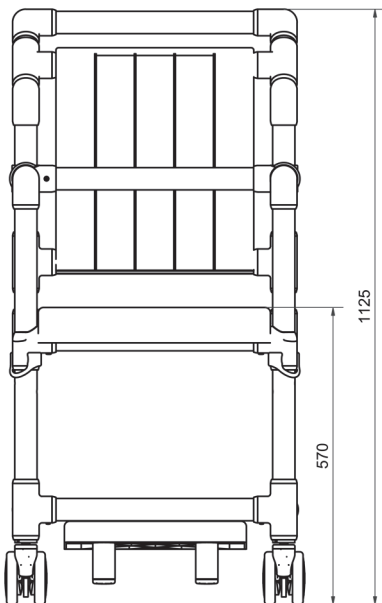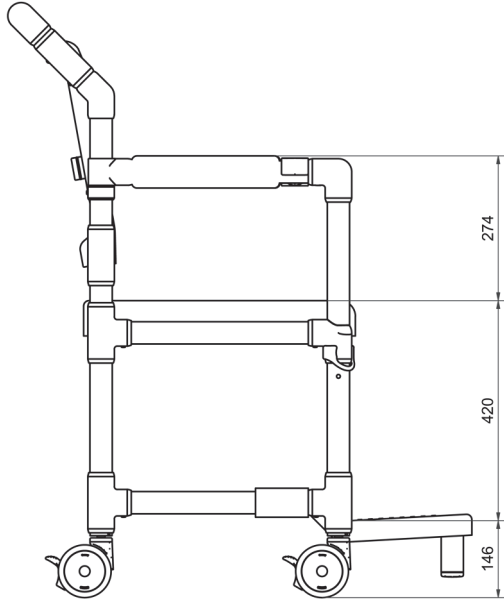

TC 450 MRT

Gewicht: 21 kg

Maximale Belastbarkeit: 150 kg

7 Kennzeichnung

Auf dem Rahmen des Produktes befinden sich Etiketten mit den folgenden Symbolen:

	Medizinprodukt
	CE Kennzeichen
	Bestellnummer
	Seriennummer
	maximales Benutzergewicht kg
	Hersteller
	Herstelldatum JJJJ-MM
ab 01.01.2025	
	Unique Device Identifier Barcode GS1 DataMatrix
(01) 04260629321092 (21) 202105673	(01) GTIN (Bsp.) (02) Seriennummer (Bsp.)
	Geeignet für MRT Bereiche mit Geräten bis 3 Tesla.

8 Reinigung und Desinfektion

Das Produkt kann einfach mit warmem Wasser, max. 60 °C, und haushaltsüblichen Reinigungsmitteln gereinigt werden. Verwenden Sie dazu einen Schwamm oder ein weiches Tuch. Achtung: Verwenden Sie keine Stahlwolle und keine Scheuermittel! Für die manuelle Aufbereitung wischen Sie alle Komponenten mit einem farblosen Flächen-Desinfektionsmittel ab, das für Kunststoffe geeignet ist. Beachten Sie die Hinweise zu den

Einwirkzeiten und zur sicheren Anwendung des Herstellers.

Für die Polster aus Polyurethanschaum gilt: Nicht mit scharfen Gegenständen reinigen oder bearbeiten. Nur Reinigungsmittel auf Seifenbasis (basisch) anwenden, Temperatur bis 80 °C. Saure Reinigungsmittel sind nicht geeignet.

Achtung: Beim Einsatz von Schnelldesinfektionsmitteln darf grundsätzlich während der Einwirkzeit und 20 Minuten danach nicht an den Polstern gerieben werden. Die Polster müssen ggf. vorher von Schmutz befreit werden.

Damit die Leichtgängigkeit der ausziehbaren Fußstütze erhalten bleibt, reinigen Sie bitte die Zwischenräume nach Bedarf durch Hin- und Herschieben der gleitenden Teile unter einem starken Wasserstrahl. Das Einsprühen der Gleitflächen mit Silikonspray fördert die Leichtgängigkeit.

9 Wartung und Inspektion

Das Produkt ist wartungsfrei, wenn die beschriebenen Reinigungs- und Sicherheitsvorschriften beachtet werden.

Eine komplette Inspektion ist mindestens einmal jährlich durchzuführen. Hierbei muss der korrekte und feste Sitz der Verbindungen geprüft werden. Ebenso müssen alle Verbindungselemente auf Rissbildungen untersucht werden. Gegebenenfalls muss das Produkt bis nach der Reparatur außer Betrieb genommen werden.

Wöchentlich sind die Lauf- und Dreheigenschaften der Rollen und die Funktion der Feststellbremsen zu prüfen.

10 Lagerung, Wiedereinsatz u. Entsorgung

Lagerung: Lagern Sie das Produkt bei Temperaturen von 0 °C bis 40 °C in einer trockenen Umgebung bis max. 75% Luftfeuchtigkeit. Das Modell kann nicht zerlegt oder gefaltet werden.

Wiedereinsatz: Das Produkt ist für den wiederholten Einsatz geeignet. Die Häufigkeit ist von der Abnutzung und der Funktionstauglichkeit abhängig. Reinigen und desinfizieren Sie das Produkt entsprechend Kapitel 8. Geben Sie das Produkt nur weiter, wenn alle Komponenten ihre Funktionen erfüllen.

Entsorgung: Das Produkt beinhaltet keine gefährlichen Stoffe. Sie können das Produkt der lokalen Entsorgung zuführen.

11 Garantie / Haftung

Für das gelieferte RCN Produkt leisten wir dem Endabnehmer gegenüber Garantie zu den folgenden Bedingungen:

Die Garantiezeit beträgt generell 3 Jahre, für den Kunststoff- oder Metallrahmen beträgt sie 5 Jahre. Sie beginnt mit dem Zeitpunkt der Übergabe des Produkts an den Benutzer. Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg in Verbindung mit der Angabe der auf dem Produkt aufgetragenen Serien-Nummer.

Die Garantie umfasst die Beseitigung der innerhalb der Garantiezeit auftretenden Schäden oder Mängel am Produkt, die nachweislich auf Material-

oder Fertigungsfehlern beruhen. Hiervon ausgenommen sind Teile, die einem natürlichen Verschleiß unterliegen. Wir behalten uns vor, die Garantieleistung durch Austausch oder Reparatur der beschädigten Teile zu erbringen. Nicht unter die Garantie fallen Schäden infolge unsachgemäßer Handhabung und Benutzung, durch Nichtbeachtung der hier enthaltenen Hinweise, bei Verwendung nicht geeigneter oder abrasiver Reinigungsmittel bzw. im Falle mutwilliger Beschädigung.

Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler/Handelspartner oder direkt an RCN. Falls das Produkt zum Zweck der Reparatur an uns versandt wird, geschieht dies auf Kosten und Gefahr des Absenders.

Berechtigte Garantieleistungen werden ohne jede Berechnung durchgeführt. Sie bewirken weder eine Verlängerung noch einen Neubeginn der Garantiezeit für das Produkt.

Weitergehende Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz von nicht am Produkt entstandenen Schäden, sind ausgeschlossen. Diese Garantie besteht zusätzlich und beeinträchtigt in keiner Weise gesetzliche oder andere Rechte von Endverbrauchern.

Wir betrachten es als unsere vorrangige Aufgabe, Produkte zu entwickeln und herzustellen, die den Bedürfnissen unserer Kunden bestmöglich entsprechen. Sagen Sie es uns, wenn Sie meinen, dass wir etwas ändern oder verbessern sollten und wenn Sie zufrieden sind, sagen Sie uns das auch, denn darüber freuen wir uns natürlich am meisten. Unsere Email-Adresse, Telefonnummer und Faxnummer sowie unsere Postanschrift finden Sie auf der ersten Seite.

Ihr RCN Team

Stand: 01.06.2023