



Fauteuil roulant de transport pour l'environnement IRM DR 100 MRT



Contenu

1 Introduction	1
2 Utilisation prévue	1
3 Règles générales de sécurité	1
4 Utilisation et fonctions	1
5 Accessoires	2
6 Données techniques	2
7 Marque d'identification	3
8 Nettoyage et désinfection	3
9 Entretien et inspection	3
10 Stockage, réutilisation et élimination	3
11 Garantie / Responsabilité	4

1 Introduction

Ce mode d'emploi contient des informations importantes sur l'utilisation du produit. Lisez attentivement le mode d'emploi et suivez en particulier les consignes de sécurité

2 Utilisation prévue

Le fauteuil roulant est destiné au transport d'adolescents et d'adultes handicapés moteurs et peut être utilisé dans l'environnement IRM jusqu'à 3 Tesla.

Le déplacement peut se faire en tant que fauteuil roulant à pousser avec une personne auxiliaire ou en autonomie.

Indication : le produit apporte une aide en cas de mobilité réduite ou de perte d'équilibre. Contre-indication : incapacité à s'asseoir. Dans ce cas, le fauteuil roulant ne peut être utilisé qu'avec une personne auxiliaire.

Durée de vie du produit : la durée de vie prévue est de 10 ans. En fonction de l'usure de certains composants (par exemple les roues et les coussins), il peut être nécessaire de les remplacer plus tôt. La durée de vie peut être prolongée par l'utilisation de pièces de rechange.

3 Règles générales de sécurité

La chaise de transport est uniquement autorisée pour une utilisation à l'intérieur des bâtiments. Il est uniquement adapté aux surfaces planes. N'utilisez pas le produit toute la journée, car l'absence de suspension et de possibilités de réglage peut nuire à la santé en cas d'utilisation prolongée. Lorsque le produit est en mouvement, il ne faut pas passer la main entre le frein et la roue ou dans les rayons en rotation des roues motrices. Aucun objet, tel qu'un vêtement, ne doit se trouver dans les rayons.

Les petites irrégularités du sol et les obstacles ne peuvent être franchis qu'avec l'aide d'un accompagnateur. L'obstacle doit être franchi avec les deux roues pivotantes en même temps afin d'éviter tout basculement latéral. Ne déplacez pas votre poids en inclinant le haut du corps latéralement, frontalement ou vers l'arrière, comme par exemple en attrapant des objets. Cela peut entraîner le basculement de la chaise. Ne dépassez pas l'allure du pas lorsque vous utilisez le fauteuil roulant.

Tous les incidents graves liés à ce produit doivent nous être signalés (fabricant) ainsi qu'aux autorités compétentes.

4 Utilisation et fonctions


• Roues 24" avec anneau de préhension

Les roues 24" en polyuréthane sont résistantes aux crevaisons. En tant qu'utilisateur autonome, seuls les anneaux de préhension (mains-courantes) doivent être utilisés pour la propulsion. Il faut alors particulièrement éviter les collisions ou les contacts avec les murs, car les mains dépassent alors du fauteuil roulant et sont particulièrement exposées à des blessures.


• Freins de stationnement

Pour bloquer les freins, les leviers doivent être poussés vers l'avant/le bas. Lorsque les freins sont bloqués, le fauteuil roulant ne doit pas pouvoir être déplacé avec une charge.

Les freins d'arrêt ne doivent pas être utilisés pour réduire la vitesse pendant la conduite. Un actionnement irrégulier peut entraîner une perte de direction. En cas de fermeture soudaine, le fauteuil roulant freine fortement et l'utilisateur peut tomber.

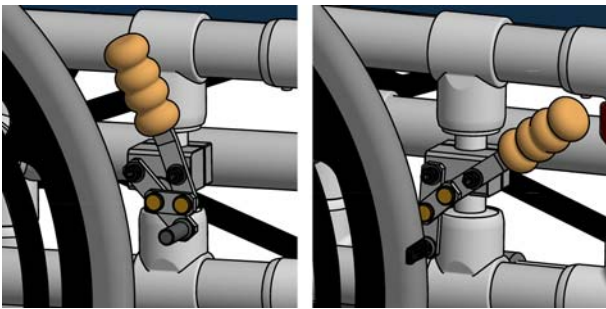


Le repose-pied sert à poser les pieds. Le repose-pied est fixé de manière coulissante aux montants inférieurs du cadre ; il est ainsi facile de le mettre en position en le tirant vers l'avant ou en le repoussant vers l'arrière. Le repose-pied ne doit pas être chargé de tout le poids du corps, sinon le fauteuil roulant risque de basculer.

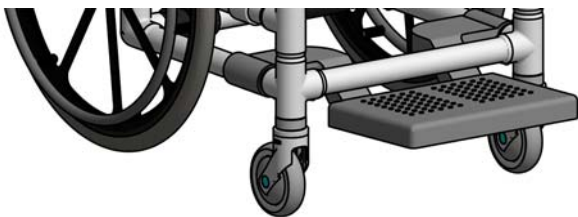

- accoudoir pivotant ASA

Il facilite le transfert de l'utilisateur dans ou hors du fauteuil. Pour ce faire, desserrez d'abord le dispositif d'arrêt (1) en tournant l'étrier en plastique rouge de 90° vers le haut. Soulevez ensuite l'accoudoir à l'arrière au niveau de l'articulation (2) et faites-le pivoter vers l'extérieur (3). Le blocage s'effectue dans l'ordre inverse. Une fois le transfert effectué, bloquez toujours l'accoudoir ! Attention : ne chargez pas l'accoudoir lorsqu'il est pivoté vers l'extérieur !

A : Etrier de sécurité fermé
B : Etrier de sécurité ouvert

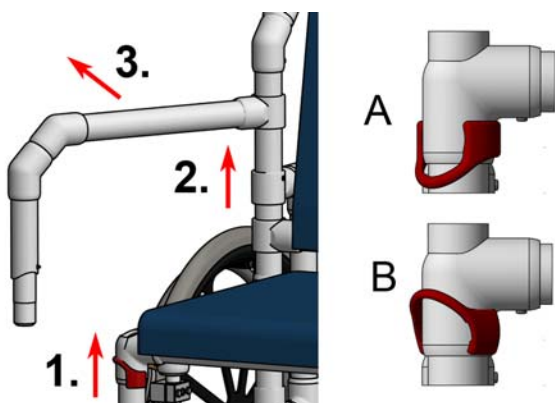

- Assise rembourrée PUS

L'assise en mousse de polyuréthane augmente le confort en position assise. L'assise se pose simplement sur le cadre d'assise de la chaise et peut être retirée pour être nettoyée.

- Dossier rembourré PR

Le dossier rembourré augmente le confort en position assise. Il suffit d'insérer le dossier rembourré dans la partie arrière (dorsale) du châssis inférieur bas, puis d'introduire la partie supérieure haute du dossier en tirant légèrement l'endroit incurvé vers le haut. Il est tout aussi facile de le retirer pour le nettoyer.






5 Accessoires

Pas d'accessoires.

6 Données techniques

Toutes les dimensions sont indiquées en millimètres.

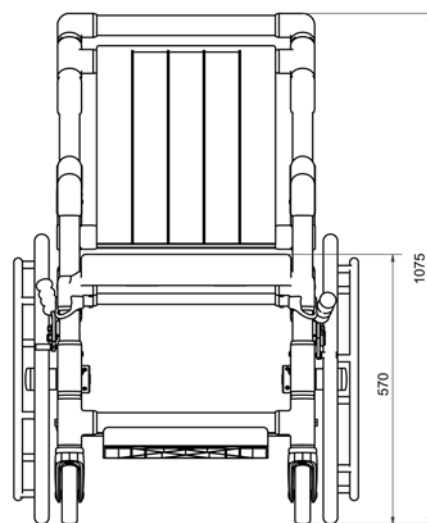

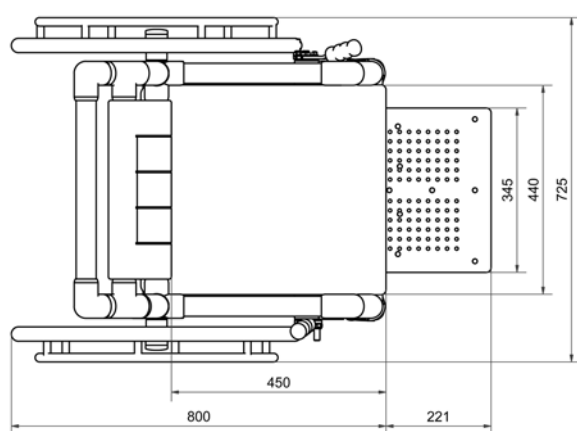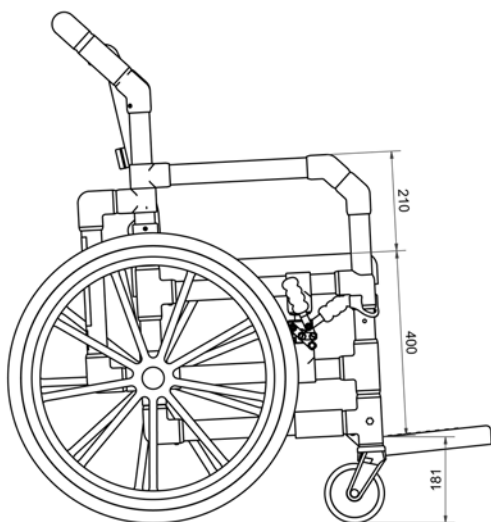

DR 100 MRT

Poids : 32,0 kg

Capacité de charge maximale : 150 kg

7 Marque d'identification

Sur le cadre du produit se trouvent des étiquettes avec les symboles suivants :



Dispositif médical



Marque CE



Numéro de commande



Numéro de série



maximum
Poids de l'utilisateur kg



Fabricant



Date de fabrication
AAAA-MM

à partir du
01.01.2025

UDI



Identifiant unique de
l'appareil
Code à barres
GS1 DataMatrix

(01) 04260629321092
(21) 202105673

(01) GTIN (ex.)
(02) Seriennummer (ex.)



3T
or
Less

Convient à
l'environnement IRM -
compatible avec des
appareils jusqu'à 3 Tesla.

8 Nettoyage et désinfection

Le produit peut être nettoyé facilement avec de l'eau chaude et des produits de nettoyage ménagers courants. Utilisez pour cela une éponge ou un chiffon doux. Attention : n'utilisez pas de laine d'acier ni de produits abrasifs ! Pour le traitement manuel, essayez tous les composants avec un désinfectant de surface incolore. Respectez les instructions du fabricant concernant les temps d'action et la sécurité d'utilisation.

Pour les rembourrages en mousse polyuréthane : ne pas nettoyer ou manipuler avec des objets tranchants. N'utiliser que des produits de nettoyage à base de savon (basique), température jusqu'à 80 °C. Les produits de nettoyage acides ne conviennent pas.

Attention : en cas d'utilisation de désinfectants rapides, il ne faut en principe pas frotter les coussins pendant le temps d'action et 20 minutes après. Le cas échéant, les coussins doivent être préalablement débarrassés de la saleté. Afin de conserver la souplesse de fonctionnement du repose-pieds extensible, veuillez nettoyer les espaces intermédiaires selon les besoins en faisant glisser les pièces coulissantes d'avant en arrière sous un jet d'eau puissant. Vaporiser les surfaces de glissement avec un spray au silicone favorise la souplesse de fonctionnement.

9 Entretien et inspection

Le produit ne nécessite aucun entretien si les consignes de nettoyage et de sécurité décrites sont respectées.

Une inspection complète doit être effectuée au moins une fois par an. Il s'agit de vérifier la fixation correcte et solide des raccords. De même, tous les éléments de fixation doivent être contrôlés pour vérifier l'absence de fissures. Le cas échéant, le produit doit être mis hors service jusqu'à ce que la réparation soit effectuée.

Les propriétés de roulement et de rotation des roulettes ainsi que le fonctionnement des freins d'arrêt doivent être contrôlés toutes les semaines.

10 Stockage, réutilisation et élimination

Stockage : Stocker le produit à une température comprise entre 0 °C et 40 °C dans un

environnement sec avec un taux d'humidité maximal de 75%.

Réutilisation : Le produit est adapté à une utilisation répétée. La fréquence dépend de l'usure du produit de son utilisation à la fonction. Nettoyez et désinfectez le produit conformément au chapitre 7. Ne donnez le produit à un tiers que si tous les composants remplissent leurs fonctions.

Élimination des déchets : Le produit ne contient pas de substances dangereuses. Vous pouvez mettre le produit au rebut au niveau local.

11 Garantie / Responsabilité

Nous offrons à l'utilisateur final une garantie sur le produit RCN dans les conditions suivantes :

La période de garantie est généralement de 3 ans ; pour le cadre en plastique ou en métal elle est de 5 ans. Elle commence au moment où le produit est remis à l'utilisateur. Sont considérés comme preuves d'achat et de garantie, la facture et le numéro de série indiqué sur chaque produit RCN.

La garantie couvre la réparation des dommages ou des défauts du produit survenus au cours de la période de garantie qui sont manifestement basés sur des défauts de matériel ou de fabrication. Cela ne s'applique pas aux pièces soumises à l'usure normale. Nous nous réservons le droit de fournir un service de garantie en remplaçant ou en réparant les pièces endommagées. La garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une manipulation et d'une utilisation inappropriées, du non-respect des instructions contenues dans le présent document, de l'utilisation de produits de nettoyage inadaptés ou abrasifs ou en cas de dommages intentionnels. En cas de demande de garantie, veuillez contacter votre revendeur/détaillant ou directement RCN. Si le produit nous est envoyé pour réparation, l'envoi se fera aux frais et aux risques de l'expéditeur.

Les services de garantie justifiés seront effectués sans frais. Ils ne prolongent ni ne renouvellent la période de garantie du produit.

Toute autre prétention, en particulier les demandes d'indemnisation pour des dommages non causés au produit, est exclue. Cette garantie s'ajoute et n'affecte en rien les droits statutaires ou autres des utilisateurs finaux.

Nous considérons que notre tâche principale est de développer et de fabriquer des produits qui répondent parfaitement aux besoins de notre clientèle. N'hésitez pas à nous faire savoir si vous pensez que nous devrions changer ou améliorer quelque chose et si vous êtes satisfait, faites-le nous savoir, car c'est ce qui nous fait le plus plaisir, bien sûr. Vous trouverez notre adresse électronique, notre numéro de téléphone et de télécopie ainsi que notre adresse postale sur la première page.

Votre Equipe RCN

Stand: 10.11.2022