

# Le Déambulateur RCN, pas comme les autres !

Découvrez ses **12** points de qualité un par un :



# Focus sur les points de qualité du Déambulateur RCN



Le déambulateur RCN offre à la personne à mobilité réduite une sécurité incomparable pour la progression de la marche. Ce déambulateur a été conçu spécialement en vue de motiver la personne à mobilité réduite pour l'entraînement à la marche. Les patients à risque de chutes y trouvent une excellente aide à la marche en toute sécurité.

Le déambulateur RCN présente un outil de travail indispensable dans le domaine de la kinésithérapie. Il encourage la personne susceptible de chuter à plus d'autonomie dans ses déplacements. Le cadre avec barre et ceinture de sécurité ainsi que le siège rembourré rassurent l'utilisateur lors de ses essais à la marche. Après chaque effort physique, il a le moyen de s'asseoir et de se reposer avant de reprendre la marche. En effet, cette possibilité a un impact très positif sur l'utilisateur et permet d'éviter les MRL.

Le déambulateur RCN se situe entre le déambulateur classique et le fauteuil roulant.



Charge maximale autorisée

# 150 kg

Le déambulateur RCN est conçu en modules de résine de synthèse spéciale très solides supportant une grande charge.



La sécurité chez RCN prime avant tout ! C'est pourquoi le déambulateur est testé et approuvé par le TÜV et des Laboratoires accrédités.



La ceinture de sécurité tendue se fixe sur la barre de sécurité. En cas de chute, l'utilisateur sera retenu.



Le cadre de sécurité en résine de synthèse spécifique renforce la stabilité et garantit plus de sécurité pendant les déplacements.

**5.**  
POINT DE QUALITÉ



La hauteur se règle en 6 positions à intervalles de 2,5 cm.

**6.**  
POINT DE QUALITÉ



Les 6 roulettes doubles en acier / plastique, Ø75 mm à rotation libre, 4 équipées de freins, assurent une grande maniabilité.

**7.**  
POINT DE QUALITÉ



L'assise rembourrée en mousse polyuréthane garantit une assise hygiénique et confortable à tout moment.

**8.**  
POINT DE QUALITÉ



Le dossier en tissu imperméable Textilene® est lavable et résiste aux désinfectants.

**9.**  
POINT DE QUALITÉ

**Certification  
allemande :  
10.46.02.0006**

Le déambulateur RCN a obtenu la certification en qualité d'aide à la vie pour malades et handicapés grâce à sa valeur thérapeutique.

**10.**  
POINT DE QUALITÉ



Cette sacoche pratique en tissu Textilene® permet le rangement de divers ustensiles ; elle s'attache sur l'accoudoir.

**11.**  
POINT DE QUALITÉ

**5**  
ANS  
GARANTIE

Nous nous engageons entièrement sur la qualité de nos produits. Il en découle la garantie de 5 ans sur la structure.

**12.**  
POINT DE QUALITÉ

**MADE IN  
GERMANY**  
★ ★ ★

Pour la fabrication des produits RCN, nous misons sur des matériaux innovants et de nouvelles technologies tout en gardant notre savoir-faire artisanal.

# Plus qu'un Déambulateur ... !

Quelques gestes simples suffisent pour régler le déambulateur individuellement au besoin de chaque utilisateur.



Ouvrir la ceinture et la barre de sécurité



Aider l'utilisateur à s'installer



Régler la hauteur par rapport à la taille de la personne



Fermer la barre de sécurité à l'aide du loquet



Attacher la ceinture de sécurité tendue à la barre de sécurité



Faire les premiers essais accompagné de personnel professionnel

# Options



**GIH** Tige de perfusion adaptée


**GSB** Tablette thérapeutique, à clipser sur les accoudoirs

**GGP** Rembourrage de la ceinture de sécurité

**AFS** Pare-chocs

**GWSP** Coussin d'assise amovible

**GFT** Repose-pieds

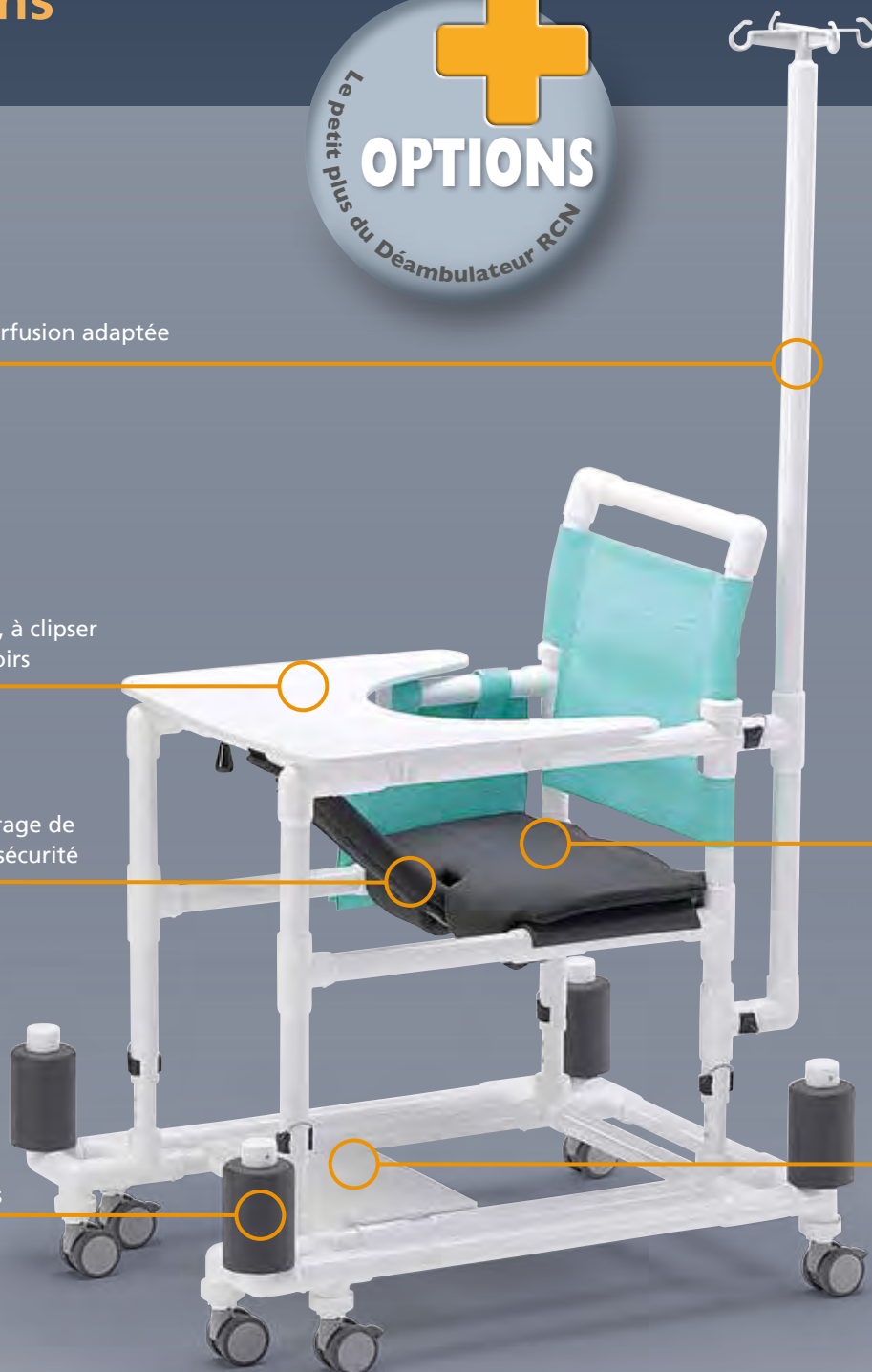

**GIH** La tige de perfusion s'installe simplement au niveau du cadre à l'arrière; l'utilisateur peut donc se déplacer avec.

**GSB** La tablette thérapeutique se clipse sur les accoudoirs. L'utilisateur s'en sert p.ex. pour une pause café.

**GGP** La partie rembourrage se fixe autour la ceinture de sécurité avec une bande à velcro. L'utilisateur est ainsi doucement retenu.

**GWSP** Le coussin d'assise double le confort.

**GFT** Selon la pathologie de l'utilisateur, le repose-pieds peut être très utile. Il se laisse glisser en avant et en arrière; on peut également l'enlever.

**AFS** Cette protection en mousse „PUR“ amortit efficacement des chocs ; elle protège murs et mobilier et empêche l'accrochage éventuel avec un obstacle.

# Modèle de base et variantes



Photo avec GSB,  
tablette thérapeutique (en option)

## Modèle de base GW 120 :

permet sécurité et indépendance dans le cadre de la qualité de vie de l'utilisateur ; aide à contourner les MRL.

- assise hygiénique rembourrée en mousse polyuréthane
- barre de sécurité avec ceinture de sécurité
- grand cadre de sécurité
- sacoche de rangement
- très maniable grâce aux roulettes doubles Ø75 mm dont 4 à freins
- réglage en hauteur facile en 6 positions grâce aux clips
- charge maximale 150 kg
- Code en Allemagne : 10.46.02.0006 correspond au Code LPP en France

Modèle	Dimensions hors tout			Assise			Hauteur accoudoirs	Charge maximale	Poids
	Profondeur	Largeur	Hauteur	Profondeur	Largeur	Hauteur			
GW 120	99	78,5	107,5-122,5	32,5	44,5	52,5-67,5	78,5-93,5	150	18
GW 120 Mini	89	72	88,5-103,5	26	38,5	39-54	59,5-74,5	150	16
GW 120 Maxi	112,5	83,5	104-119	34	50	45-60	75-90	200	30,5

Toutes les données en cm ou kg

Sous réserve d'erreurs d'impression et de modifications techniques



### GW 120 Mini

Modèle destiné aux personnes de petite taille

- Taille maximale 155cm
- Coussin d'assise avec housse en tissu épais et soyeux

### GW 120 Maxi

Modèle pour personne forte voire obèse

- Charge maximale 200kg
- Coussin d'assise en tissu épais et soyeux

GW 120 : Coussin d'assise en mousse polyuréthane



graphit

GW 120 Maxi et GW 120 Mini :  
Tissu épais et soyeux pour coussin d'assise



safran



cerise



ciel



sapin



anthracite

Tissu Textilene® pour dossier et sacoche :



blanc



bleu foncé



bleu



bleu gris



vieux rosé



laguna



jaune



konfetti

**RCN : simplement incomparable en  
Qualité, Prestations et Savoir-Faire !**

**RCN MÉDICAL E.U.R.L.**

Bâtiment „Alessandro France“  
Avenue Verrerie Sophie · F-57600 Forbach  
Tél. : 03 87 85 60 09 · Fax : 03 87 87 61 93  
infos@rcn-medical.fr

**[www.rcn-medical.fr](http://www.rcn-medical.fr)**

09/2017

